

医療用品04 整形用品
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣（71105001）

MIGARU Light Knit（ミガル ライト ニット）


【禁忌・禁止】

- ・湿疹、かぶれ、傷口等、皮膚に異常がある人は使用しないで下さい。
- ・異常（かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー、かぶれなど）を感じたら、ご使用を中止して下さい。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造

寸法（単位：cm / 公差：±10%）

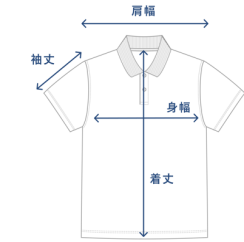

Short Sleeve Polo Shirt

サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	66	40.7	48	22.4
S	69	43.1	51	23.2
M	72	45.5	54	24
L	75	47.9	57	24.8
XL	78	50.3	60	25.6




Short Sleeve T-Shirt

サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
XS	67	43.2	52	25.9
S	70	45.6	55	26.7
M	73	48	58	27.5
L	76	50.4	61	28.3
XL	79	52.8	64	29.1




Women's Short Sleeve T-Shirt

サイズ	着丈	肩幅	身幅	袖丈
S	55.5	33.6	39	33
M	58	36	42	34
L	60.5	38.4	45	35

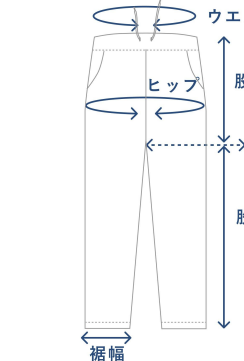

Short Pants

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
S	69	94	27.5	21	27.4
M	75	100	28.5	22	29
L	81	106	29.5	23	30.5
XL	87	112	30.5	24	32.1
2XL	93	118	31.5	25	33.7

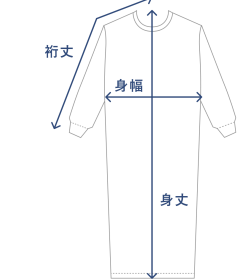

Long Pants

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
XS	69	94	27	68	16
S	75	100	28	70	17
M	81	106	29	72	18
L	87	112	30	74	19
XL	93	118	31	76	20



Women's Long Pants

サイズ	ウエスト	ヒップ	股上	股下	裾幅
S	61	97	27	70	24.5
M	67	103	28	71	25.5
L	73	109	29	72	26.5

Women's Short Sleeve Tunic

サイズ	身丈	袖丈	身幅
S	121.5	35.8	58
M	124	38	62.5
L	126.5	40.2	65.8

2. 原理

本品は原材料繊維に高純度セラミックを定着させる加工が施されており、身体から放出される体熱を伝導、吸収し遠赤外線の波長を放出（輻射）し、遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のコリ等の症状を改善する衣類型の医療機器です。

3. 原材料（主なもの）

ポリエステル

【使用目的又は効果】

遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のコリ等の症状を改善する。

（血行促進作用効果）

- ・疲労軽減
- ・筋肉のコリ等の改善
- ・疲労回復

【使用方法等】

- ・本品は再使用が可能です。
- ・本品に破損がないことを事前に確認して使用して下さい。
- ・衣類として直接肌に着用して下さい。
- ・日常活動時及び睡眠時のいずれでも着用可能です。
- ・効果は個人差があるため、20日以上長期着用が望ましいです。
- ・睡眠時の着用は、発汗作用が高まる可能性があるため、水分補給を行って下さい。

【使用上の注意】

- ・着脱できない方に使用の場合は、周りのご家族が異常がないことを注意し、観察しながら使用して下さい。
- ・移染や色落ちの可能性があるため、洗濯の際には注意して下さい。
- ・着用や洗濯、摩擦により他の物に色移りや、プリントが剥がれる場合があるので注意して下さい。
- ・長時間水に浸けたり、濡れたまま重ね置きしたりすると、淡色部や他の物に色移りする場合があるので注意して下さい。
- ・蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用して下さい。
- ・漂白剤の使用は避けて下さい。
- ・長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、注意して下さい。
- ・目立つ毛玉は、ハサミや毛玉取り器で取り除いて下さい。
- ・湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合があるので注意して下さい。
- ・火気に近づくと生地表面に着火することがあるので注意して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管して下さい。
- ・しばらく使用しない時は一度干してから、湿気のない場所で保管して下さい。
- ・耐用期間：2年間
（この期間は目安であり、使用状況によって異なります。）

【包装】

1枚／袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社TENTIAL
〒141-0001
東京都品川区北品川六丁目7番29号521号室
電話番号：03-6455-2921

ご使用前に必ずこの文章をお読みください