

接続吸引チューブ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 1) 再使用・再滅菌禁止


【形状・構造および原理等】

本品形状

- ・本体

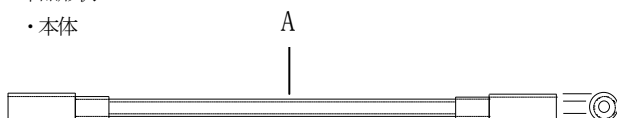

・付属チューブ

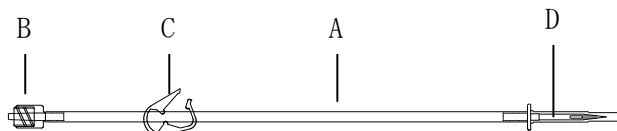

材質

部品	材質
A:メインチューブ	ポリ塩化ビニル
B:PCコネクタ	ポリカーボネート
C:クランプ	ポリアセタール
D:プラスチック針	ポリアセタール

本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用している。

【使用目的又は効果】

本品は、術中の体液等の排出時に吸引器と回収容器等との接続に用いる柔軟性のあるチューブである。

付属品として術野の洗浄を目的として使用する洗浄チューブが付属する場合がある。

また、滅菌済みであるためそのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

【一般的な使用方法】

- 1) 汚染に充分注意しながら包装を開封し、包装内から製品を取り出す。
- 2) 本品の接続部内径と接続する機器の外径を確認し、本品を吸引器及び回収容器等の接続部にしっかりと接続する。
- 3) 本品の接続部に緩み、又は外れがないことを確認した後、使用する。

【付属品の使用方法】

- 1) 洗浄チューブが付属する場合は、予めクランプを操作し洗浄チューブを閉塞状態とし、プラスチック針挿入時の薬液の漏れを防ぐ。
- 2) 使用する液体パックの栓部にプラスチック針を確実に挿入する。
- 3) クランプを開放し、薬液を導入する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品を使用する前にあらかじめ接続部に緩み、又は外れがないことを確認すること
- 2) 本品をハブ又はコネクタ等と接続する場合、ゆるみや外れが生じないようにしっかりと接続すること。
- 3) プラスチック針の液体バック栓部への抜き差しはプラスチック針本体を持って行うこと。[プラスチック針からチューブが抜ける可能性がある。]
- 4) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。

- 5) 本品を、吸引器より高い位置へ固定したり、持ち上げたりしないこと。[排液が逆流する可能性がある。]
- 6) 可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出する恐れがある。
- 7) 脂肪乳剤および脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油などの油性成分、界面活性剤またはアルコールなどの溶解剤などを含む医薬品を投与する場合およびアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、ポリカーボネート樹脂製のコネクタのひび割れについて注意すること。[薬液によりコネクタにひび割れが生じ、薬液漏れ、空気混入などの可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付けおよび増し締めは、ひび割れの発生を助長する要因となる。]

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管方法
水濡れに注意し、直射日光、紫外線及び高温多湿を避け、乾燥した涼しい場所で室温にて保管すること。
- 2) 有効期間
製品ラベル参照。
[自己認証(当社データ)による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ハナコメディカル株式会社

〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2-24-11
TEL 048-881-4001