

機械器具 51 医療用嘴管及び体液吸引導管
一般医療機器 カテーテルコネクタ 32339000

ハナコ・誤接続防止コネクター

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞


- 1) 再使用・再滅菌禁止

＜併用医薬品＞

- 1) 本品を通してアルコール、フェノール等を含む薬剤を注入しないこと。[相互作用の項参照]
2) 本品の接続部分をアルコールを含む消毒剤で拭かないこと。[相互作用の項参照]

【形状・構造および原理等】

本品形状

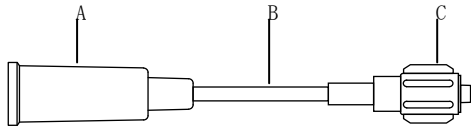

材質

部 品	材 質
A：サクシジョンコネクター	ポリ塩化ビニル
B：チューブ	ポリ塩化ビニル
C：PC コネクター	ポリカーボネート

本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用している。

【使用目的又は効果】

本品は胆道系、膵管系、尿路系、気道系、消化器官系及び分泌腺に留置した排液用カテーテルと、延長チューブあるいは排液を貯蓄するドレーナージバッグ等の別の対象物に接続する際、誤接続防止を目的として使用するコネクターである。

【使用方法等】

＜一般的使用方法＞

- 1) 包装を開封し、包装内から製品を取り出す。
2) 目的部位に挿入された排液用カテーテルにPCコネクターを確実に接続する。
3) 手動式低圧持続吸引器、又は自動式低圧持続吸引器の排液用延長チューブのコネクターをサクシジョンコネクター側へ確実に接続する。
4) 胆汁バック、又はドレーナージバッグを接続する場合は、排液用延長チューブのコネクターをサクシジョンコネクター側へ確実に接続する。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 1) 本品は、排液を目的とした体内留置用ドレーナージチューブの誤接続防止コネクターとして作られている為、高圧負荷の掛かる機器及び器具への使用はしないこと。
2) 本品を他の機器と接続する場合には、ゆるみや外れの発生がないように確実に接続を行うこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品の接続が短期間又は長期間に関らず、本品の破損、接続部の緩み、液漏れ、外れには十分に注意し、定期的に確認すること。
2) 本品の接続部の固定を確認し、就寝時、体位交換時、歩行移動時などにおいては、本品の外れには十分に注意すること。
3) 可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出する恐れがある。
4) 脂肪乳剤および脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油などの油性成分、界面活性剤を使用する場合は、ポリカーボネート樹脂製のコネクターのひび割れについて注意すること。[薬液によりコネクターにひ

び割れが生じ、薬液漏れ、空気混入などの可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付けおよび増し締めは、ひび割れの発生を助長する要因となる。]

- 5) ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
6) 全ての接続が正確かつ安全であることを確認すること。
7) 本品に接続不可能な製品とは併用しないこと。

＜相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）＞

1. 併用禁忌（併用しないこと）

医薬品等の名称等	臨床症状・処置方法	機序・危険因子
アルコール、フェノール等を含む薬剤	本品に注入しないこと。	ひび割れが生じて薬液が漏れる可能性がある。
アルコールを含む消毒剤	本品の接続部分を拭かないこと。	ひび割れが生じて薬液が漏れる可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管方法
水濡れに注意し、直射日光、紫外線及び高温多湿を避け、乾燥した涼しい場所で室温にて保管すること。
2) 有効期間
製品ラベル参照。
[自己認証(当社データ)による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ハナコメディカル株式会社
〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2-24-11
TEL 048-881-4001