

排液バッグ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 種類・規格

構成	規格
バッグ	320mm×230mm、2000ml(容量)
導液チューブ	φ8.0mm(内径)×φ11mm(外径)×1000mm
排液チューブ	φ8.6mm(内径)×φ11mm(外径)×140mm
エアフィルター	20mm×20mm
ドレナージストッパー	55mm×20mm
排液コネクター	40mm×14mm

本品はバッグ及び導液チューブ、排液チューブにポリ塩化ビニルを使用しています。

2. 形状・構造

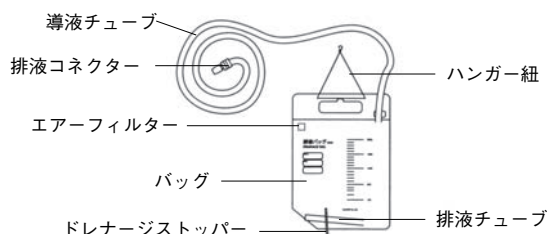

【使用目的又は効果】

体幹部（胸部及び周囲部を除く）におけるドレインから、血液、膿状分泌物等の排液を除去するために用いる医療機器（サージドレイン・オープントップ、サージドレイン・ジッパー）と併用し、排液等を保持する。

【使用方法等】

1. 使用前

ドレナージストッパーをスライドさせて、排液チューブが完全に閉じていることを確認します。

2. サージドレイン・オープントップ、サージドレイン・ジッパー（以下「サージドレイン」）への接続方法

- 1) サージドレインの口具のキャップを外します。
- 2) 本品の排液コネクターをサージドレインの口具に隙間がなくなるまで押し込みます。
- 3) 外すときは片手でサージドレインの口具を押さえながら引き抜きます。

3. ベッドへの吊り下げ方

ハンガー紐をそのままベッドのフレームに通し、S字金具に引掛けます。

4. 排出の仕方

- 1) ドレナージストッパーをスライドさせて排液チューブを開き、排液を排出します。
- 2) 排液チューブはドレナージストッパーをスライドさせ閉じた後、チューブをチューブ差し込み口に入れます。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用前には必ず排液チューブが閉じていることを確認すること。
- 2) 本品は泥状の排液でもドレナージ出来るよう逆流防止機能は付いていない。その為本品をコネクター接合部より低い場所に設置すること。また使用中は本品を傾けたり、激しく動かしたりしないこと。
- 3) 泥状の排液を保持する場合、チューブ等に貯留することがある。貯留した場合にはミルキング等を実施すること。
- 4) エアフィルターに排液等が付着すると排液等が流れにくくなる可能性がある。エアフィルターに排液等が付着し、排液が排出できなくなった場合は、本品を交換すること。
- 5) チューブが折れた状態で使用すると流れが遮断されることがあるので注意すること。
- 6) 本品は消耗品なので、使用中は本品に漏れ等がない事を確認し、漏れ等が発見された場合には直ちに交換すること。
- 7) 本品の目盛りは目安なので、正確に計量したい場合は他の容器に移し替えること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び高温多湿を避け、室温で保管すること。

2. 有効期間

パッケージに表示。（自己認証データによる）

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

アルケア株式会社

2. 連絡先

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
お客様相談室： ☎ 0120-770-175