

骨盤鈎

【禁忌・禁止】

1. 目的以外の使用禁止
本製品を以下の使用目的以外に使用しないでください。
目的以外での使用は思わぬ事故を招く恐れがあります。
2. 二次加工、修理、分解の禁止
本製品に曲げ、切削、打刻(刻印)等の改造(二次的加工)を行わないでください。器具の折損を招く恐れがあります。
適切な指示なく修理、分解はしないで下さい。器具の折損、変形を招く恐れがあります。
3. 接触凝固での使用禁止
接触凝固など、電気メス先を器具に直接触れさせないでください。感電、火傷の原因となります。

【形状・構造および原理等】

1. 原材料/材質:ステンレス鋼
2. 形状・構造
本製品の形状は右図のとおり。



【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

軸様のハンドルをもつ手術器具をいう。ハンドルは様々な形状のものがあり、遠位端に向かって先細になっている。遠位部は丸い先端又は尖った先端に向かってカーブしているものもあれば曲がっているものもある。

【使用方法等】

〈使用方法〉

本製品は、使用前に必ずオートクレーブ又はガスによる滅菌処理をして使用する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・ 本製品は未滅菌ですので使用前に洗浄、消毒、滅菌を行ってください。
- ・ 使用前に正常に作動する事を確認してください。
- ・ 折損、変形等の原因になるので、本製品に必要以上の力を加えないで下さい。
- ・ 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因となるので付着した場合は直ちに清水で洗浄してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 腐食を防ぐ為、本製品の洗浄後は直ちに乾燥させてください。
2. 滅菌済の本製品を貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐ為清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間を管理してください。
3. 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクター等)で洗浄する際には他の製品と接触して損傷する事のないよう注意して下さい。
4. 洗剤の残留がないように十分にすすぎ洗いをして下さい。
仕上げにすすぎには、浄化水(蒸留、脱イオン等)を使用してください。
5. 洗浄後は腐食防止の為に直ちに乾燥してください。
6. 洗浄後滅菌前に、汚れ、損傷、変形、摺動部の動き等に異常がないことを点検してください。
7. 錆を防止する為に水性防錆潤滑剤を洗浄後滅菌前に塗布してください。
8. 点検完了後、セット・包装し滅菌してください。
9. 強アルカリ・強酸性洗剤・消毒剤は、製品を腐食させる恐れがあるので使用は避けてください。金属たわし、磨き粉等は製品の表面を損傷するので使用は避けてください。洗剤は医療用洗剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないで下さい。

【製造業者及び製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社東京エム・アイ商会

住所:東京都江東区平野3-2-6

電話番号:03-6458-5588

製造業者:Seward Medical Limited trading as Seward Thackray社
国名:英国