

医療用品（6）視力表及び色盲検査表
一般医療機器 特殊視力検査装置（70973000）

「ミラクルチャート MC-4」の付属品
液晶リモートコントローラー LR-4

※※【形状・構造及び原理等】

当該添付文書は、新タイプに適用する。

1. 構成

本品は、液晶リモートコントローラーLR-4のみで構成される。

選択できる視標の種類、操作内容並びにスイッチの配置の異なる3種類（D6タイプ、D3タイプ、Fタイプ）がある。

2. 寸法：76mm(W) × 250mm(H) × 22mm(D)
(リング部分含まず)

3. 使用環境

温度：10℃～40℃

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa



その他「取扱説明書」の「使用上の注意」を熟読し、遵守すること。

※※【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態）

温度：10℃～40℃

湿度：10%～95%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態）

温度：-20℃～50℃

湿度：10%～95%

3. 輸送（包装（梱包）状態）

温度：-40℃～70℃

湿度：10%～95%

4. 保管場所については次の事項に注意すること。

（1）水のかからない場所に保管すること。

（2）気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

（3）傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。

（4）化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

5. 耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年（自己認証「当社データ」による）

※【使用目的又は効果】

ミラクルチャート MC-4 を操作し、提示する検査視標を選択する。

※【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 液晶リモートコントローラーLR-4とミラクルチャートMC-4 本体のチャンネル設定、及び通信設定を合わせます。

2. 液晶リモートコントローラーLR-4のスイッチを押して、ミラクルチャート MC-4 本体の動作をコントロールします。

詳細はミラクルチャート MC-4の「取扱説明書」の「使うための準備」、及び「基本操作」を参照のこと。

※【使用上の注意】

＜その他の注意＞

1. 機器を設置するときは次の事項に注意すること。

（1）水のかからない場所に設置すること。

（2）気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。

（3）傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。

（4）化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。

（5）電池電源の状態（放電状態、極性など）を確認すること。

2. 機器を使用する前には次の事項に注意すること。

（1）スイッチの接触状況、極性などの点検を行ない、機器が正確に作動することを確認すること。

（2）機器の併用は正確な診断を誤らせたり、危険をおこす恐れがあるので、十分注意すること。

（3）電池電源を確認すること。

3. 機器の使用中は次の事項に注意すること。

（1）診断に必要な時間をこえないように注意すること。

（2）機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。

（3）機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。

（4）機器に患者が触れることのないよう注意すること。

4. 機器の使用後は次の事項に注意すること。

（1）定められた手順により操作スイッチなどを使用前の状態に戻したのち、電源を切ること。

（2）機器は次の使用に支障のないよう必ず清潔にしておくこと。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

※【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

2. 長時間使用しない場合は、必ず電池を抜いて保管すること。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい

4243891032-20021001