

医療用品（6）視力表及び色盲検査表
一般医療機器 特殊視力検査装置（70973000）「ミラクルチャート MC-5」の付属品
液晶リモートコントローラー LR-5

【形状・構造及び原理等】

1. 構成
本品は、液晶リモートコントローラーLR-5のみで構成される。
2. 電気の定格
電源電圧：DC3V（単3乾電池2本）
3. 寸法：76mm(W) × 250mm(H) × 22mm(D)
（リング部分含まず）
4. 使用環境
温度：10℃～35℃
湿度：30%～90%（結露なきこと）
気圧：800hPa～1060hPa



【使用目的又は効果】

本体を操作し、提示する検査視標を選択する。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 使用前に、液晶リモートコントローラー LR-5 の電池電源の状態(放電状態、極性など)を確認する。
2. 本体及び液晶リモートコントローラー LR-5 の電源スイッチを ON にする。
3. 被検眼と同じ高さに液晶リモートコントローラー LR-5 を保持し、液晶リモートコントローラー LR-5 の操作ボタンのうち、アライメントエミッターボタンを押すことで、被検者の目の高さに本体の視標提示位置を合わせる。
4. 液晶リモートコントローラー LR-5 を操作し、提示する視標を選択する。
5. 使用後は、液晶リモートコントローラー LR-5 の電源スイッチを OFF にする。

詳細はミラクルチャート MC-5 の「取扱説明書」の「使うための準備」、及び「基本操作」を参照のこと。

【使用上の注意】

＜その他の注意＞

液晶リモートコントローラーLR-5 を使用しないときは電源を OFF にすること。
[誤操作により、誤診を招く恐れがあります。]
ボタンやスイッチ等に過度の力を加えないこと。
[ボタンやスイッチ等が破損する恐れがあります。]

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。
その他「取扱説明書」の「使用上の注意」を熟読し、遵守すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態）
温度：-10℃～55℃
湿度：10%～95%（結露なきこと）
気圧：700hPa～1060hPa
2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態）
温度：-10℃～55℃
湿度：10%～95%
気圧：700hPa～1060hPa
3. 輸送（包装（梱包）状態）
温度：-40℃～70℃
湿度：10%～95%
気圧：500hPa～1060hPa
4. 保管場所については次の事項に注意すること。
(1) 水のかからない場所に保管すること。
(2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン成分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

- (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
5. 耐用期間
正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年（自己認証「製造業者データ」による）

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. 長時間使用しない場合は、必ず電池を抜いて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

製造業者

株式会社タカハタ電子

取扱説明書を必ずご参照下さい

MZ009025T00-20102101