


機械器具（２２）検眼用器具
一般医療機器
細隙灯顕微鏡（35148000）
「スリットランプSL-2G」の付属品
ルビーレンズ SO-HL01

＊【形状・構造及び原理等】

１．構成

本品は、ルビーレンズのみで構成される。

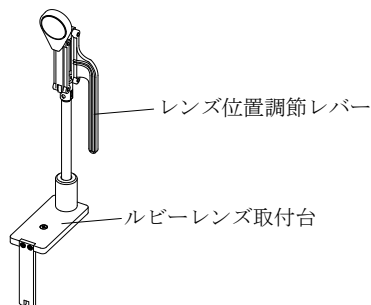

２．寸法： 34mm(W) × 70mm(D) × 236mm(H)

３．作動原理

角膜や水晶体の屈折の効果を低減し、眼底や後部硝子体の観察を可能にする。

４．使用環境

温度：10℃～40℃

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

本品は販売名

スリットランプ SL-2G

（医療機器届出番号 13B1X0003000SL2G）

の付属品である。

＊【使用目的又は効果】

スリットランプ SL-2G（以下「スリットランプ」という）と組み合わせ、眼底及び硝子体を観察するために使用する。

＊【使用方法等】

＜使用方法＞

- スリットランプの照明アームのキャップを外します。
- ルビーレンズ取付台を照明アームに取り付けます。
- ルビーレンズのシャフトをルビーレンズ取付台に挿入します。
- スリットランプの顕微鏡部、および照明部を被検眼の正面に配置します。
- ルビーレンズのレンズ位置調節レバーを操作して、レンズを視野の中心に配置します。
- スリットランプのコントロールレバーを操作して、焦点を眼底及び後部硝子体に合わせます。

＊【使用上の注意】

＜その他の注意＞

- 機器を設置するときは次の事項に注意すること。
 - 水のかからない場所に設置すること。
 - 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
 - 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
 - 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
- 機器を使用する前には次の事項に注意すること。
 - 機器の併用は正確な診断を誤らせたり、危険をおこす恐れがあるので、十分注意すること。
- 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - 診断に必要な時間をこえないように注意すること。
 - 機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
 - 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。

と。

（４）機器に患者が触れることのないよう注意すること。

４．機器の使用後は次の事項に注意すること。

（１）機器は次回の使用に支障のないよう必ず清浄にしておくこと。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

＊【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

１．貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態）

温度：10℃～40℃

湿度：10%～95%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

２．貯蔵・保管（包装（梱包）状態）

温度：-20℃～50℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

３．輸送（包装（梱包）状態）

温度：-40℃～70℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

４．保管場所については次の事項に注意すること。

- （１）水のかからない場所に保管すること。
- （２）気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- （３）傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- （４）化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

５．耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから８年（自己認証[当社データ]による）

＊【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい