


機械器具(22) 検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 (35148000)

「スリットランプSL-D2」
「スリットランプSL-D4」
「スリットランプSL-D4Z」
「スリットランプSL-D7」
「スリットランプSL-D8Z」
「スリットランプSL-2G」
「スリットランプSL-D701」の付属品 *
TV リレーレンズ TL-54
TV リレーレンズ TL-55

**【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、TVリレーレンズのみで構成される。
本品は、Cマウント 1/2型 TVカメラ用のTVリレーレンズ TL-54とCマウント 1/3型 TVカメラ用のTVリレーレンズ TL-55がある。

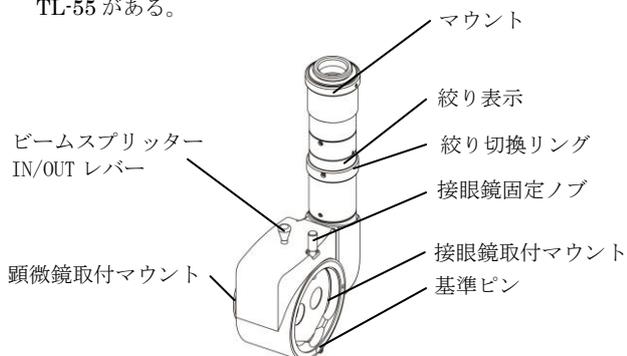

2. 寸法 (カバー部を除く)

- (1) TVリレーレンズ TL-54
寸法: 105mm(W) × 55mm(D) × 191mm(H)
(2) TVリレーレンズ TL-55
寸法: 105mm(W) × 55mm(D) × 175mm(H)

3. 使用環境

温度: 10°C~40°C
湿度: 30%~90% (結露なきこと)
気圧: 700hPa~1060hPa

本品は販売名

- スリットランプ SL-D2
(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD2)
スリットランプ SL-D4
(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD4)
スリットランプ SL-D4Z
(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD4Z)
スリットランプ SL-D7
(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD7)
スリットランプ SL-D8Z
(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD8Z)
スリットランプ SL-2G
(医療機器届出番号 13B1X0003000SL2G)
スリットランプ SL-D701*
(医療機器届出番号 13B1X00030SLD701)
の付属品である。

詳細は本品の「取扱説明書」の「各部の名称」と「仕様・性能」を参照のこと。

**【使用目的又は効果】

顕微鏡部に組合わせ、観察像を市販のテレビカメラの撮像面に結像するために用いる。

**【使用方法等】

<使用方法>

1. スリットランプに本品を取り付けます。
2. 本品にTVカメラを取り付けます。
3. スリットランプ本体の取扱説明書「視度調節と眼幅調節」の項を参照して、視度調節を行います。
4. 本品の“ビームスプリッターIN/OUTレバー”を下げて、ビームスプリッターを観察光路に入れます。
5. 観察倍率、観察部位により適正光量は変わりますので、“絞り切換リング”により絞りを調節するか、観察照明の明るさを調節します。

詳細は本品の「取扱説明書」の「取付方法」と「使用方法」を参照のこと。

**【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

本品の構成部品が、確実に取り付けられていること。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

**【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. TVカメラを取付けない場合は、マウント部にキャップをすること。

詳細は本品の「取扱説明書」の「保守・点検に係る事項」を参照のこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 トプコン
TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい