

機械器具(22) 検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 (35148000)

「スリットランプSL-D2」
「スリットランプSL-D4」
「スリットランプSL-D4Z」
「スリットランプSL-D7」
「スリットランプSL-D8Z」
「スリットランプSL-2G」
「スリットランプSL-D701」の付属品 ※
TV リレーレンズ


※※【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、TVリレーレンズのみで構成される。
バヨネットマウント1/2型TVカメラ用、Cマウント1/2型TVカメラ用、Cマウント1/3型TVカメラ用の3種類がある。


- ・バヨネットマウント1/2型TVカメラ用

ビームスプリッター取付マウント

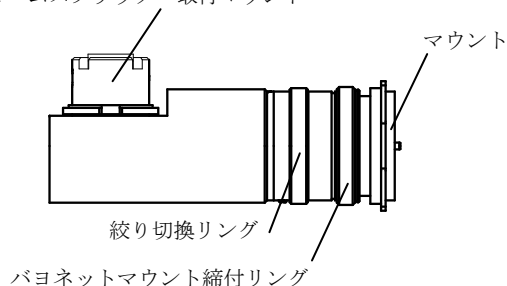


- ・Cマウント1/2型TVカメラ用

ビームスプリッター取付マウント

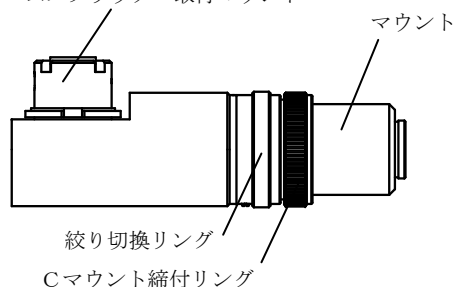

- ・Cマウント1/3型TVカメラ用

ビームスプリッター取付マウント

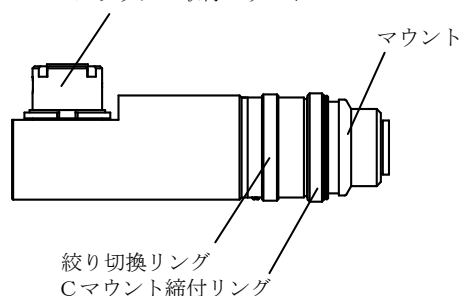

2. 寸法

- ・バヨネットマウント1/2型TVカメラ用
寸法: 56mm(W) × 66mm(D) × 170mm(H)
- ・Cマウント1/2型TVカメラ用
寸法: 50mm(W) × 66mm(D) × 175mm(H)
- ・Cマウント1/3型TVカメラ用
寸法: 55mm(W) × 65mm(D) × 190mm(H)

3. 使用環境

温度: 10°C~40°C
湿度: 30%~90% (結露なきこと)
気圧: 700hPa~1060hPa

本品は販売名

スリットランプ SL-D2
(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD2)
スリットランプ SL-D4
(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD4)
スリットランプ SL-D4Z
(医療機器届出番号 13B1X000300SLD4Z)
スリットランプ SL-D7
(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD7)
スリットランプ SL-D8Z
(医療機器届出番号 13B1X000300SLD8Z)
スリットランプ SL-2G
(医療機器届出番号 13B1X0003000SL2G)
スリットランプ SL-D701※
(医療機器届出番号 13B1X00030SLD701)
の付属品である。

※※【使用目的又は効果】

ビームスプリッターとともに顕微鏡部に組み合わせ、観察像を市販のテレビカメラの撮像面に結像するために用いる。

※※【使用方法等】

＜使用方法＞

1. スリットランプにビームスプリッターを取り付けた後、本品をビームスプリッターに取り付けます。
2. 本品にTVカメラを取り付けます。
3. 本品の絞り操作により、撮影像の明るさを変えることができます。

※※【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. TVカメラを取付けない場合は、ほこりが入らないようにキャップをすること。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 トプコン
TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい