


機械器具（22）検眼用器具  
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 JMDN コード 35148000  
「スリットランプ SL-D4」の付属品  
内方視接眼鏡 CB-8

**【形状・構造及び原理等】**

## 1. 構成

本品は、内方視接眼鏡 CB-8 のみで構成される。

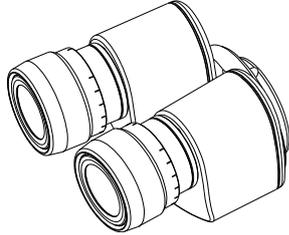

2. 寸法：96～120mm(W) × 118mm(D) × 84～89mm(H)

## 3. 使用環境

温度：10℃～40℃

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

**【使用目的又は効果】**

顕微鏡部の接眼レンズ、視度調整リング、接眼鏡と交換し用いる接眼鏡。

**【操作方法等】**

<取り付け方法>

1. スリットランプの接眼鏡を取り外します。
2. 本品をスリットランプに取り付けます。
3. スリットランプの顕微鏡部のピンと、本品の溝を合わせて入れ、ネジを締めて固定します。

<使用方法>

1. テスト棒をスリットランプに取り付け、黒い面を顕微鏡に直角にセットします。
2. 照明明るさ調節ノブを中間位置にします。
3. スリット開閉ノブ、絞り、スリット長さ変換ノブを回してφ10mmの照明にします。
4. 片方の視度調節リングを反時計回りに止まるまで回します。
5. 視度調節リングを時計回りに回してテスト棒がはっきりと見えた所で止めます。止めた所の視度目盛の値が視度(D)を表しています。
6. もう片方の接眼レンズの視度を上記の手順で合わせます。
7. 接眼鏡部を持ち、接眼レンズを両目でのぞきテスト棒に投影した像が一致し、立体的に見えるように眼幅を調整します。

**【使用上の注意】**

重要な基本的注意

本品が確実に取り付けられていることを確認してから使用する。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

**【保守・点検に係る事項】**

使用者による保守点検事項

しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい