


機械器具（22）検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 （35148000）

「スリットランプSL-D7」
「スリットランプSL-D8Z」の付属品
バックグランド照明 BG-4

※※【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、（1）ランプハウス部
（2）ライトガイド部で構成される
ライトガイド部

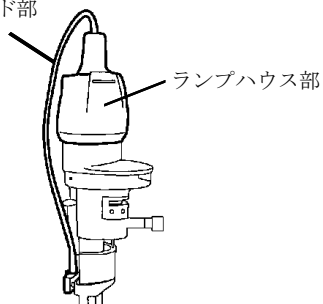

2. 寸法：ランプハウス部

80mm(W) × 80mm(D) × 116mm(H)

ライトガイド部長さ 440mm

3. 使用環境

温度：10°C～40°C

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

本品は販売名

スリットランプ SL-D7

（医療機器届出番号 13B1X0003000SLD7）

スリットランプ SL-D8Z

（医療機器届出番号 13B1X000300SLD8Z）

の付属品である。

詳細は「取扱説明書」の「各部の名称」と「仕様・性能」を参照のこと。

※※【使用目的又は効果】

本体の照明部から照明光をライトガイドにより導光し、補助照明として用いる。 ※

※※【使用方法等】

＜使用方法＞

1. スリットランプにバックグランド照明BG-4を取り付けます。
2. 照明光量を切り換えます。

詳細は本品の「取扱説明書」の「取付方法」及び「使用方法」を参照のこと。

※※【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

本品の構成品が、確実に取り付けられていること。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

※※【保守点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

しばらく使用しなかった機器を再使用する時には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

詳細は本品の「取扱説明書」の「管理と点検」を参照のこと。

取扱説明書を必ずご参照下さい