


機械器具（２２）検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 JMDNコード 35148000

「スリットランプSL-D7」 「スリットランプSL-D8Z」の付属品 赤外透過フィルター付きバックグランド照明 BG-4M

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、（１）ランプハウス部
（２）ライトガイド部で構成される

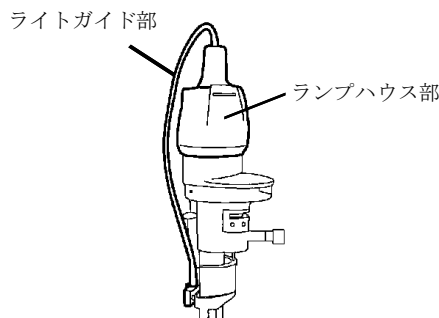

2. 寸法及び質量

寸法：ランプハウス部
80mm(W) × 80mm(D) × 116mm(H)
ライトガイド部長さ 440mm
質量：340g

本品は販売名

スリットランプ SL-D7
(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD7)

スリットランプ SL-D8Z
(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD8Z)

の付属品である。

詳細は本品の「取扱説明書」の「各部の名称」と「仕様・性能」を参照のこと。

【使用目的、効能又は効果】

本体の照明部から照明光をライトガイドにより導光し、補助照明として用いる。また眼球及びその付属器の赤外観察用照明として用いる。 ＊ ＊

【品目仕様等】

可視観察照明光量３段階切換又は赤外観察照明への切換
(赤外観察はTVリレーレンズ、またはTVアタッチメントと赤外感度のあるTVカメラとの組合せで行う)

詳細は本品の「取扱説明書」の「仕様・性能」を参照のこと。

【操作方法又は使用方法等】

＜使用環境＞ ＊

温度：10℃～40℃

湿度：30%～90% (結露なきこと)

気圧：700hPa～1060hPa

＜使用方法＞

1. スリットランプに赤外透過フィルター付きバックグランド照明BG-4Mを取り付けます。
2. 照明光量切換え又は赤外透過フィルターへの切換を行います。

詳細は本品の「取扱説明書」の「取付方法」及び「使用方法」を参照のこと。

【使用上の注意】

基本的注意事項

本品の構成品が、確実に取り付けられていること。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
2. しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

詳細は本品の「取扱説明書」の「管理と点検」を遵守すること。

【包装】 ＊

包装単位：１台

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称および住所等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

東京都板橋区蓮沼町７５番１号

TEL 03-3558-2506

製造業者

株式会社 トプコン山形