

機械器具(22) 検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 JMDNコード 35148000

「スリットランプSL-D7」
「スリットランプSL-D8Z」
「スリットランプSL-D701」※
「スリットランプSL-D301」の付属品※※
深度絞りユニット SO-DF01

※※【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、深度絞りユニットのみで構成される。

深度絞り用切り換えレバー
光量絞り用切り換えレバー



2. 寸法: 本体部

70mm(W) × 27.5mm(D) × 76mm(H)

本品は販売名

スリットランプ SL-D7

(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD7)

スリットランプ SL-D8Z

(医療機器届出番号 13B1X000300SLD8Z)

スリットランプ SL-D701

(医療機器届出番号 13B1X00030SLD701)

スリットランプ SL-D301

(医療機器届出番号 13B1X00030SLD301)

の付属品である。

詳細は本品の「取扱説明書」の「各部の名称」を参照のこと。

※※【使用目的又は効果】

観察光量、撮影光量の調整又は被写界深度を変えるために用いる。

※※【使用方法等】

＜使用環境＞

温度: 10°C～40°C

湿度: 30%～90% (結露なきこと)

気圧: 700hPa～1060hPa

＜使用方法＞

1. スリットランプの顕微鏡部に SO-DF01 を取り付けます。

2. SO-DF01 の次に使用する撮影装置を取り付けます。

詳細は本品の「取扱説明書」の「取付方法」及び「取り扱い方法」を参照のこと。

【使用上の注意】

基本的注意事項

本品の構成部品が、確実に取り付けられていること。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

※※【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

製造業者

株式会社 トプコン山形

取扱説明書を必ずご参照下さい