

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 可搬型手術用顕微鏡（36354020）
特定保守管理医療機器 「手術用顕微鏡OMS－90」の付属品
付属品アダプター MS－AD01

【警告】

使用前には、必ず手術用顕微鏡OMS－90の締付けハンドルやネジ、ノブ等が確実に締め付けられていることを確認すること。

〔落下により死傷する恐れがあります〕


付属品の着脱は患者の上で行わないでください。

〔落下により死傷する恐れがあります。〕

＊【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、付属品アダプターのみで構成される。

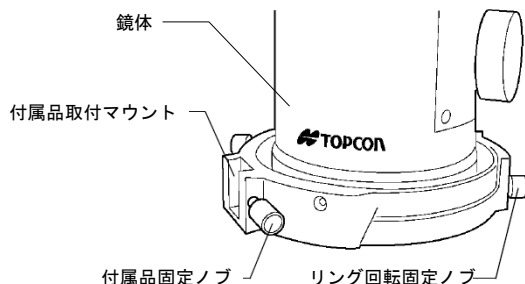

2. 寸法：106mm(W)×88mm(D)×20mm(H)

3. 作動原理

手術用顕微鏡OMS－90に、付属品を取付け可能とする。

4. 使用環境

温度：10℃～40℃

湿度：30%～75%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

＊【使用目的又は効果】

手術用顕微鏡OMS－90と組み合わせ、付属品の助手用顕微鏡と斜照明を取付ける。

＊【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 付属品取付マウントに付属品を取付け、付属品固定ノブを締め付けて付属品を固定します。
2. リング回転固定ノブを緩め、別売付属品を必要な位置に合せた後、リング回転固定ノブを締めて固定します。

詳細は手術用顕微鏡OMS－90の「取扱説明書」の「別売付属品」を参照のこと

＊【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

ご使用前には、必ず赤マークの付いている締付けハンドルやネジ、ノブ等が確実に締め付けられていることを確認してください。

〔落下により死傷する恐れがあります。〕

＜その他の注意＞

1. 機器を設置するときは次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に設置すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
- (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。

2. 機器を使用する前には、必ず付属品固定ノブ等が確実に締め付けられていることを確認すること。

3. 機器の使用中は次の事項に注意すること。

- (1) 機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
- (2) 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。
- (3) 機器に患者が触れることのないよう注意すること。

4. 機器の使用後は、次の使用に支障のないように必ず洗浄しておくこと。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

＊【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態）

温度：10℃～40℃

湿度：30%～75%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態）

温度：-20℃～50℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

3. 輸送（包装（梱包）状態）

温度：-20℃～50℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

4. 保管場所については次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

5. 耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年（自己認証〔当社データ〕による）

＊【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚れを除去し洗浄、消毒すること。
2. しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506