

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 可搬型手術用顕微鏡（36354020）
特定保守管理医療機器 「手術用顕微鏡OMS－90」の付属品
斜照明 MS－O104


【警告】

使用前には、必ず手術用顕微鏡OMS－90の締め付けハンドルやネジ、ノブ等が確実に締め付けられていることを確認すること。
[落下により死傷する恐れがあります。]
付属品の着脱は患者の上で行わないこと。
[落下により死傷する恐れがあります。]

＊【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、斜照明のみで構成される。

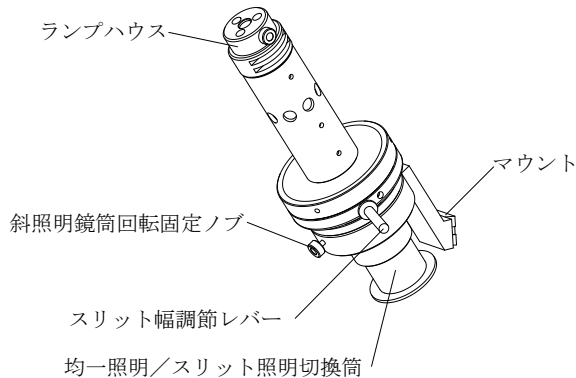

2. 寸法：107mm(W)×151mm(D)×200mm(H)

3. 作動原理

手術用顕微鏡OMS－90からの電源供給により光源を点灯し、照明光学系を通して観察部位を照明する。

4. 使用環境

温度：10℃～40℃

湿度：30%～75%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

＊【使用目的又は効果】

手術用顕微鏡OMS－90の照明装置と併用又は単独で、観察部位を斜め方向から照明する際に用いる。

＊【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 手術用顕微鏡OMS－90の斜照明スイッチをONにします。
2. 均一照明を使用する場合、均一照明／スリット照明切換筒を押し込んだ状態にし、スリット幅調節レバーを回して“OPEN”の位置に合わせます。
3. スリット照明を使用する場合、均一照明／スリット照明切換筒を引き出した状態にし、スリット幅調節レバーを“SLIT”へ回して必要なスリット幅に合わせます。
4. スリット照明を使用している際、スリットを回転させる場合、斜照明鏡筒回転固定ノブを緩め、スリット幅調節レバーにて斜照明鏡筒を回転させてスリットを必要な位置に調節します。位置決め後、斜照明鏡筒回転固定ノブを締め付けて斜照明鏡筒を固定し、スリット幅を再調節します。

詳細は手術用顕微鏡OMS－90の「取扱説明書」の「別売付属品」を参照のこと

＊【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

ご使用前には、必ず赤マークの付いている締め付けハンドルやネジ、ノブ等が確実に締め付けられていることを確認してください。

[落下により死傷する恐れがあります。]

＜その他の注意＞

1. 機器を設置するときは次の事項に注意すること。
(1) 水のかからない場所に設置すること。

- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
- (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
2. 機器の使用前には次の事項に注意すること。
(1) 機器を使用する前には、必ず付属品固定ノブ等が確実に締め付けられていることを確認すること。
- (2) スwitchの接続状況の点検を行い、機器が正確に作動することを確認すること。
- (3) コードの接続が正確でかつ安全であることを確認すること。
3. 機器の使用中は次の事項に注意すること。
(1) 診断、治療に必要な時間・量をこえないように注意すること。
- (2) 機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
- (3) 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。
- (4) 機器に患者が触れることのないよう注意すること。
4. 機器の使用後は次の事項に注意すること。
(1) 定められた手順により斜照明スイッチを使用前の状態に戻したのち、電源を切ること。
- (2) 保管場所については次の事項に注意すること。
I 水のかからない場所に保管すること。
II 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
III 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む。）など安定状態に注意すること。
IV 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- (3) 付属品、コード、導子などは洗浄したのち、整理してまとめておくこと。
- (4) 機器は次回の使用に支障のないように必ず洗浄しておくこと。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

手術用顕微鏡OMS－90の「添付文書」及び「取扱説明書」を参照のこと。

＊【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管（非梱包）状態）

温度：10℃～40℃

湿度：30%～75%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態）

温度：-20℃～50℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

3. 輸送（包装（梱包）状態）

温度：-20℃～50℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

4. 保管場所については次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

5. 耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年（自己認証「当社データ」による）

取扱説明書を必ずご参照ください

＊【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚れを除去し洗淨、消毒すること。
2. しばらく使用しなかった機器を再使用する時には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トブコン

TEL 03-3558-2506