

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 特定保守管理医療機器
可搬型手術用顕微鏡 JMDNコード36354020
「手術用顕微鏡OMS-90」の付属品
XY微動装置 MS-XY03


【警告】

使用前には、必ず手術用顕微鏡 OMS-90 の締め付けハンドルやネジ、ノブ等が確実に締め付けられていることを確認すること。
[落下により死傷する恐れがあります]

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、XY 微動装置のみで構成される。

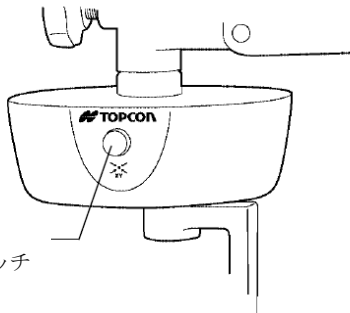

センタリングスイッチ

2. 寸法及び質量

寸法：201mm(W)×202mm(D)×200mm(H)

質量：3.2kg

3. 作動原理

本体第2アームと上下微動装置の間に取付け、フットスイッチのXY微動レバースイッチの操作で、顕微鏡部を照明光軸及び観察光軸に対して垂直方向に移動する。

【使用目的、効能又は効果】

手術用顕微鏡 OMS-90 と組み合わせ、顕微鏡部を照明光軸及び観察光軸に対して垂直方向に移動させ、観察部位を微調節する際に用いる。

【品目仕様等】

XY移動範囲：±25mm（X、Y各方向）

【操作方法又は使用方法等】

<使用環境>

温度：10℃～40℃

湿度：30%～75%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

<使用方法>

1. はじめにセンタリングスイッチを押して顕微鏡部を中央に移動します。
2. 顕微鏡操作ハンドル、または眼幅調節ノブを持ち観察部位を粗動調節します。
3. 術中はフットスイッチのXY微動レバースイッチを操作して観察部位の微動調節を行います。

詳細は手術用顕微鏡 OMS-90 の「取扱説明書」の「別売付属品」を参照のこと

【使用上の注意】

使用上の注意事項

1. 取扱説明書を熟読し、熟練した者以外は機器を使用しないこと。
2. 機器を設置するときは次の事項に注意すること。
 - (1) 水のかからない場所に設置すること。
 - (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
 - (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
 - (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。

3. 機器の使用前には次の事項に注意すること。

- (1) 機器を使用する前には、必ず付属品固定ノブ等が確実に締め付けられていることを確認すること。
 - (2) スイッチの接続状況の点検を行い、機器が正確に作動することを確認すること
4. 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - (1) 診断に必要な時間をこえないように注意すること。
 - (2) 機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
 - (3) 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。
 - (4) 機器に患者が触れることのないよう注意すること。
 5. 機器の使用後は、次の使用に支障のないように必ず清浄にしておくこと。
 6. 故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行ない、修理は専門家にまかせること。
 7. 機器は改造しないこと。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

手術用顕微鏡 OMS-90 の「添付文書」及び「取扱説明書」を参照のこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態）

温度：10℃～40℃

湿度：30%～75%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態）

温度：-20℃～50℃

湿度：10%～95%

3. 輸送（包装（梱包）状態）

温度：-20℃～50℃

湿度：10%～95%

4. 保管場所については次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

5. 耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年（自己認証「当社データ」による）

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚れを除去し洗浄、消毒すること。
2. 機器及び部品は必ず定期点検を行なうこと。
3. しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

【包装】

包装単位：1台

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

東京都板橋区蓮沼町75番1号

TEL 03-3558-2506

製造業者

株式会社 トプコン

取扱説明書を必ずご参照ください

4574591012-10032901