


機械器具 (22) 検眼用器具
一般医療機器
細隙灯顕微鏡 JMDN コード 35148000
「スリットランプ SL-D4Z」の付属品
トノメーターマウント SO-TM4

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、トノメーターマウントのみで構成される。

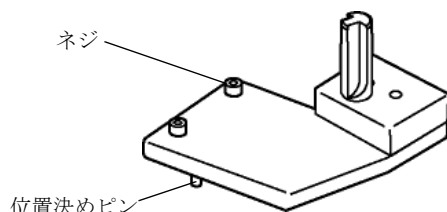

2. 寸法及び質量

寸法: 76mm(W) × 58mm(D) × 38mm(H)

質量: 100g

3. 作動原理

細隙灯顕微鏡 (以下「スリットランプ」という) に「アブラネーショントノメータ」を取り付けるためのアダプター

本品は販売名

スリットランプ SL-D4Z

(医療機器届出番号 13B1X000300SLD4Z)

の付属品である。

【使用目的、効能又は効果】

スリットランプにアブラネーショントノメータ [例 販売名「スリットランプ900」(承認番号: 15200BZY00166000、製造販売業者: ジャパンフォーカス株式会社) の付属品である「アブラネーショントノメータ 900.4.3(870Z)」] (以下「眼圧計」という) を組み合わせるために用いる。

【操作方法又は使用方法等】

1. スリットランプの顕微鏡部にある取付穴と本品の位置決めピンを合せて、ネジで固定します。
2. 本品に「眼圧計」を取付けます。

【使用上の注意】

基本的注意事項

本品が確実に取り付けられていること。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 設置環境条件 (梱包なし)

周囲温度: 10℃～40℃

相対湿度: 30%～75% (結露なきこと)

気圧: 700 hPa～1060 hPa

2. 保管場所については次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない所に保管すること。
- (3) 傾斜、振動、衝撃 (運搬時を含む) など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

東京都板橋区蓮沼町75番1号

TEL 03-3558-2506

製造業者

株式会社 トプコン山形