


機械器具(22) 検眼用器具  
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 (35148000)  
「スリットランプ SL-D8Z」の付属品\*\*  
アイポイント延長筒 S0-EE01

\*\*【形状・構造及び原理等】

1. 構成  
本品は、アイポイント延長筒のみで構成される。

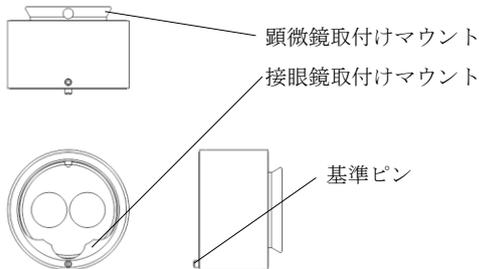

2. 寸法:  $\phi 70\text{mm} \times 51\text{mm}$   
3. 使用環境  
温度:  $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$   
湿度:  $30\% \sim 90\%$  (結露なきこと)  
気圧:  $700\text{hPa} \sim 1060\text{hPa}$

本品は販売名  
スリットランプ SL-D8Z  
(医療機器届出番号 13B1X000300SLD8Z)  
の付属品である。

\*\*【使用目的又は効果】

顕微鏡ボディと接眼鏡の間に組み合わせ、被検眼と検者との距離を長くする。

\*\*【使用方法等】

<使用方法>

- スリットランプの接眼鏡を取り外します。
- スリットランプの顕微鏡ボディに本品を取り付けます。
- 取り外した接眼鏡を本品に取り付けます。

\*\*【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

本品が確実に取り付けられていること。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

\*\*【保管方法及び有効期間等】

- 貯蔵・保管 (非包装 (非梱包) 状態)  
温度:  $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$   
湿度:  $10\% \sim 95\%$  (結露なきこと)  
気圧:  $700\text{hPa} \sim 1060\text{hPa}$
- 貯蔵・保管 (包装 (梱包) 状態)  
温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$   
湿度:  $10\% \sim 95\%$   
気圧:  $700\text{hPa} \sim 1060\text{hPa}$
- 輸送 (包装 (梱包) 状態)  
温度:  $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$   
湿度:  $10\% \sim 95\%$   
気圧:  $700\text{hPa} \sim 1060\text{hPa}$
- 保管場所については次の事項に注意すること。
  - 水のかからない場所に保管すること。
  - 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
  - 傾斜、振動、衝撃 (運搬時を含む) など安定状態に注意すること。
  - 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

5. 耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年 (自己認証 [当社データ] による)

\*\*【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい