

機械器具（22）検眼用器具  
一般医療機器 レフラクタ（35299000）  
「コンプビジョン CV－5000」の付属品  
パネルチャート PC－50S

※ 【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、パネルチャート PC－50Sのみで構成される。



2. 電氣的定格

電源電圧：交流 100-240V

周波数：50-60Hz

電源入力：135VA

3. 寸法：460 mm(W) × 65 mm(D) × 392 mm(H)

4. 使用環境

温度：10℃～40℃

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

詳細は「取扱説明書」の「各部の名称」を参照のこと。

※ 【使用目的又は効果】

PC外付CV用電源ユニットに接続したパソコンまたはPC内蔵CV用電源ユニットが出力する視力検査用視標データを表示し、視機能検査用視力表として用いる。

※ 【使用方法等】

詳細はコンプビジョンCV－5000の「取扱説明書」の「各部の名称とその働き」、本品の「取扱説明書」の「各部の名称」、「使うための準備」を参照のこと。

※ 【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

本体を壁に取り付ける場合には、構成品の壁掛け金具を用い、質量を支えることができる丈夫な壁に取り付けること（石膏ボードの壁には取り付けないこと）。

〔本体が落下し、故障したり、負傷する恐れがあります。〕

構成品の壁掛け金具は、向きに注意して壁に固定すること。

〔本体が落下し、故障したり、負傷する恐れがあります。〕

本体の検査距離の設定を、正しく設定すること。

〔測定結果の信頼性が低下する恐れがあります。〕

液晶ディスプレイに傷が付いたり、指紋、ホコリ、その他で汚れないように注意すること。

〔測定結果の信頼性が低下する恐れがあります。〕

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

その他「取扱説明書」の「使用上の注意」を熟読し、遵守すること。

※ 【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態）

温度：10℃～40℃

湿度：10%～95%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態）

温度：-20℃～50℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

3. 輸送（包装（梱包）状態）

温度：-40℃～70℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

4. 保管場所については次の事項に注意すること。

（1）水のかからない場所に保管すること。

（2）気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

（3）傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。

（4）化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

5. 耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年（自己認証〔当社データ〕による）

※ 【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 本体の検査距離の設定が正しいことを確認すること。

2. 本体が壁または付属品のフロアスタンドに、確実に取り付けられていることを確認すること。

3. しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

4. 液晶ディスプレイが汚れたときには清掃すること。

5. 使用しないときには、ダストカバーを被せること。

詳細は本品の「取扱説明書」の「使うための準備」、「管理と点検」を参照のこと。

※ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

製造業者

株式会社 タカハタ電子

取扱説明書を必ずご参照下さい