


機械器具（２２）検眼用器具
一般医療機器 レフラクタ （35299000）
「コンプレクション CV－５０００」の付属品
ミラクルチャート MC－４Ｓ

＊ ＊ 【形状・構造及び原理等】

１．構成

本品は、MC－４Ｓとアライメントエミッターで構成される。
・ MC－４Ｓ ・ アライメントエミッター

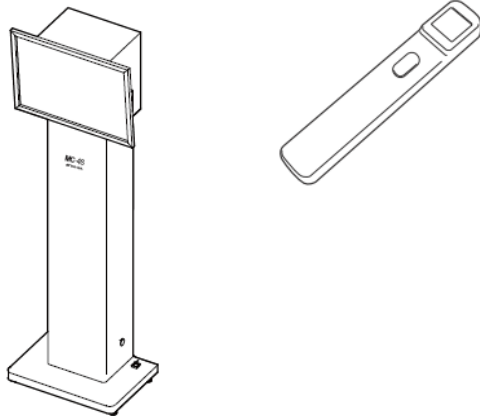

２．電氣的定格

電源電圧：交流 100V-120V、交流 200V-240V
周波数：50-60Hz
電源入力：50VA

３．

・ MC－４Ｓ
寸法：440 mm(W) × 339 mm(D) × 1330 mm(H)
・ アライメントエミッター
寸法：28 mm(W) × 20 mm(D) × 160 mm(H)

４．使用環境

温度：10℃～40℃
湿度：30%～90%（結露なきこと）
気圧：700hPa～1060hPa

詳細は本品の「取扱説明書」の「各部の名称」を参照のこと。

＊ ＊ 【使用目的又は効果】

P C 外付 C V 用電源ユニットに接続したパソコンまたは P C 内蔵 C V 用電源ユニットが出力する視力検査用視標データを表示し、視機能検査用視力表として用いる。なお、本品は光学的に遠方の視標を提示することができる。

＊ ＊ 【操作方法又は使用方法等】

詳細は本品の「取扱説明書」の「各部の名称」、「使うための準備」を参照のこと。

＊ ＊ 【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

本器の検査距離の設定を、正しく設定すること。

〔測定結果の信頼性が低下する恐れがあります。〕

視標窓に傷が付いたり、指紋、ホコリ、その他で汚れないように注意すること。

〔測定結果の信頼性が低下する恐れがあります。〕

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

その他本品の「取扱説明書」の「使用上の注意」を熟読し、遵守すること。

＊ ＊ 【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- １．本体の検査距離の設定が正しいことを確認すること。
- ２．本体が安定した場所に設置されていることを確認すること。
- ３．しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
- ４．視標窓が汚れたときには清掃すること。
- ５．使用しないときには、ダストカバーを被せること。

詳細は本品の「取扱説明書」の「使うための準備」、「管理と点検」を参照のこと。

＊ ＊ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トブコン

TEL 03-3558-2506

製造業者

大陽工業株式会社

取扱説明書を必ずご参照下さい