

機械器具（２２）検眼用器具
一般医療機器 レフラクタ（35299000）
「コンプレジジョン CV－５０００」の付属品
円偏光メガネ

＊ 【形状・構造及び原理等】

１．構成

本品は、円偏光フィルターと枠により構成される。



２．寸法：170mm(W) × 42 mm(D) × 4 mm(H)

３．使用環境

温度：10℃～40℃

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

＊ ＊ 【使用目的又は効果】

コンプレジジョンCV－５０００の付属品であるパネルチャートPC－５０SB又はミラクルチャートMC－５Sと組み合わせ使用することにより、両眼開放屈折検査並びに両眼視機能検査を行うことができる。

＊ ＊ 【使用方法等】

＜使用方法＞

円偏光メガネを通して、パネルチャートPC－５０SB又はミラクルチャートMC－５Sの視標を見せる。

【使用上の注意】

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

＊ 【保管方法及び有効期間等】

１．貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態）

温度：10℃～40℃

湿度：10%～95%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

２．貯蔵・保管（包装（梱包）状態）

温度：-20℃～50℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

３．輸送（包装（梱包）状態）

温度：-40℃～70℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

４．保管場所については次の事項に注意すること。

（１）水のかからない場所に保管すること。

（２）気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

（３）傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。

（４）化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

５．耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから 8 年（自己認証〔当社データ〕による）

＊ 【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

円偏光メガネが汚れたときには清掃すること。

＊ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

＊ ＊ 製造業者

株式会社 トプコンオプトネクス

取扱説明書を必ずご参照下さい