


機械器具（22）検眼用器具
一般医療機器 レフラクタ（35299000）
「コンプレクション CV-5000」の付属品
ミラクルチャート MC-5S

【形状・構造及び原理等】


1. 構成

本品は、以下のもので構成される。

- ・MC-5S(本体)
- ・アライメントエミッター
- ・ACアダプター
- ・電源コード
- ・HDMI ケーブル

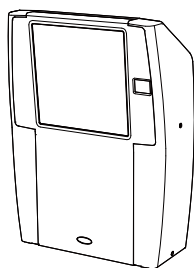

MC-5S

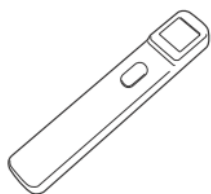

アライメントエミッター

2. 電気的定格

電源電圧：交流 100-240V

周波数：50-60Hz

電源入力：1.5A

3. 寸法

- ・MC-5S

寸法：450 mm(W)×621 mm(H)×207 mm(D)

- ・アライメントエミッター

寸法：28 mm(W)×160 mm(H)×20mm(D)

4. 動作原理

検査視標データを受けて視標窓に表示し、ミラーにより眼前に規定距離の視標サイズで視認させる。

5. 使用環境

温度：10℃～40℃

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

詳細は本品の「取扱説明書」の「各部の名称」を参照のこと。

【使用目的又は効果】

P C 外付 C V 用電源ユニットに接続したパソコンまたは P C 内蔵 C V 用電源ユニットが出力する視力検査用視標データを表示し、視機能検査用視力表として用いる。なお、本品は光学的に遠方の視標を提示することができる。

【操作方法又は使用方法等】

詳細は本品の「取扱説明書」の「各部の名称」、「使うための準備」を参照のこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

カバーを開けないこと。また、修理はサービスマンに依頼すること。

〔感電による負傷の恐れがあります。〕

AC アダプターを使用している間は、端子に触れないこと。

〔負傷の恐れがあります。〕

＜その他の注意＞

1. 必ず製造業者が指定する構成品・付属品・併用機器を使用すること。
2. 本品を運搬するときは、2 人で底面を持つこと。
〔1 人で運ぶと、腰を痛めたり、機器が落下し、けがをする恐れがあります。〕
3. ボタンやスイッチ等に過度の力を加えないこと。
〔ボタンやスイッチ等が破損する恐れがあります。〕

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

その他本品の「取扱説明書」の「使用上の注意」を熟読し、遵守すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態）

温度：10℃～40℃¹⁾

湿度：10%～95%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

- ¹⁾ 本機器は、JIS T 15004-1 の保管温度条件を満たしておりません。温度が 40℃よりも高くなる場所や、10℃よりも低くなる場所に本機器を保管しないでください。

2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態）

温度：-20℃～50℃

湿度：10%～95%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

3. 輸送（包装（梱包）状態）

温度：-40℃～70℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

4. 保管場所については次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

5. 耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから 8 年（自己認証[当社データ]による）

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 本器の設置距離の設定が正しいことを確認すること。
2. 本器が安定した場所に設置されていることを確認すること。
3. しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
4. 視標窓が汚れたときには清掃すること。
5. 使用しないときには、ダストカバーを被せること。

項目	点検時期	点検内容
点検	使用前	・ 機器が正常に作動すること ・ 視標窓に汚れ、キズがないこと
クリーニング	汚れた時	・ 視標窓 ・ 本体、スイッチなど

＜業者による保守点検＞

年に 1 回業者による保守点検を受けてください。

詳細は「取扱説明書」の「メンテナンスに関する全般的な情報」、「管理と点検」を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい