


機械器具（22）検眼用器具
一般医療機器 レフラクタ（35299000）

「コンプビジョン CV-5000」の構成品

近点カード NC-3（J）（設置距離33cm）、近点距離計（検査距離33cm用）

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

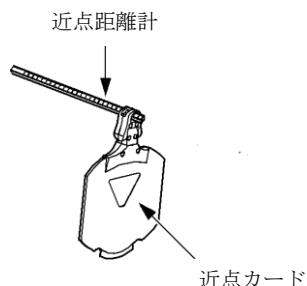

2. 寸法

近点カード：180mm(W) × 181mm(H) × 9mm(T)

近点距離計：252.5mm(L)

3. 使用環境

温度：10℃～40℃

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

【使用目的又は効果】

近点カード：近距離における視力を測定する。

近点距離計：本体部の近点距離計取り付け具に取り付け、カードホルダーを取り付ける。

【使用方法等】

<取り付け方法>

1. 近点距離計を本体の近点距離計取り付け具に差し込み、本体の固定ネジをしっかりと締めます。
2. 近点カードを近点距離計の先端に差し込みます。
3. 近点カードは近点距離計を滑って動くようになっているため、近点カード視標を手動でセットしてください。

詳細はコンプビジョン本体の「取扱説明書」をご参照ください。

【使用上の注意】

近点カードは折れ曲がる方向が決まっていますので、無理に他の方向に折り曲げないでください。

[近点カードが破損する恐れがあります。]

近点距離計の先端には顔を近づけないこと。

[接触により負傷する恐れがあります。]

近点距離計を倒したまま、下方回旋を行わないこと。

[機器や机に接触し、機器が破損する恐れがあります。]

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態）

温度：10℃～40℃

湿度：10%～95%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態）

温度：-20℃～50℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

3. 輸送（包装（梱包）状態）

温度：-40℃～70℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

4. 保管場所については次の事項に注意すること。

(1) 水のかからない場所に保管すること。

(2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

(3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。

(4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

5. 耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年（自己認証「当社データ」による）

【保守・点検に係る事項】

近点距離計が本体の固定ネジでしっかりと固定されていることを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい