

機械器具（２５）医療用鏡
一般医療機器 可搬型手術用顕微鏡 JMDNコード36354020

特定保守管理医療機器「手術用顕微鏡OMS－７１０」の付属品
助手用顕微鏡 MS－AM06


【警告】

使用前には、必ず助手用顕微鏡が確実に取り付けられていることを確認すること。
[落下により死傷する恐れがあります]
使用前には、必ず接眼鏡固定ノブが確実に締め付けられていることを確認すること。
[落下により死傷する恐れがあります]
付属品の着脱は患者の上方で行わないこと。
[落下により死傷する恐れがあります]

【形状・構造及び原理等】

１．構成

本品は助手用顕微鏡のみで構成される。

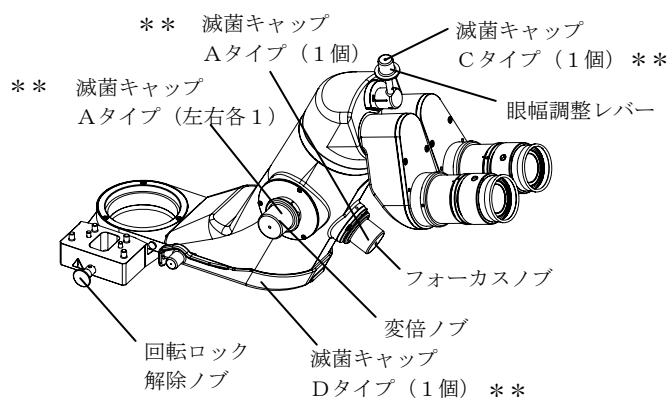

２．寸法及び質量

寸法： 140mm (W)×430mm (D)×240mm (H)

質量： 2.1kg

３．作動原理

手術用顕微鏡OMS－７１０の照明装置により照明された観察部位をミラーによって導光し、双眼実体顕微鏡により拡大観察する。

【使用目的、効能又は効果】

手術用顕微鏡OMS－７１０と組み合わせ、助手が観察を行う際に用いる。

【品目使用等】


顕微鏡部形式： ガリレオタイプ
変倍形式： ドラム３変倍
接眼鏡（接眼倍率）： 12.5倍
対物レンズ： $f=323.54\text{mm}$
表示倍率： 0.6, 1, 1.6
総合倍率： 4.1倍, 6.5倍, 10.4倍
観察方向の左右切換え： 回転式

【操作方法又は使用方法等】


＜使用環境＞ ＊
温度： 10℃～40℃
湿度： 30%～75%（結露なきこと）
気圧： 700hPa～1060hPa

＜取付方法＞


１．助手用顕微鏡の取付部のピンを鏡体底面の穴に合わせて差し込みながら、助手用顕微鏡の取付部を鏡体底面に押し当てます。この際、ピンと穴の位置がズレていると、レンズや取付面を傷つける恐れがあるので注意してください。

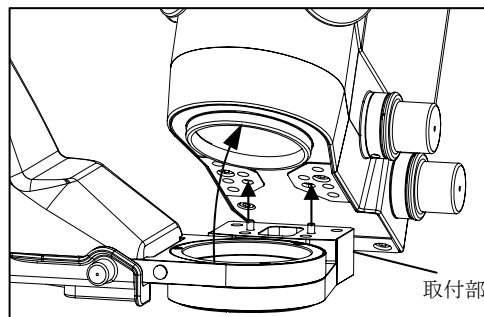


２．助手用顕微鏡取付ねじを六角棒スパナにて締付けます。

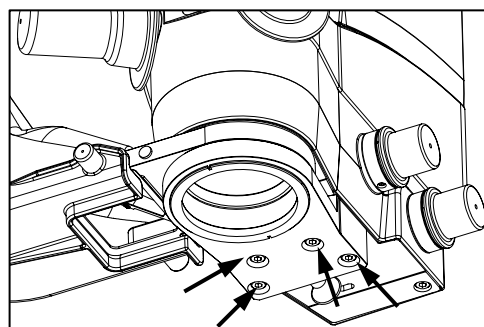

３．接眼鏡固定ノブを緩めます。

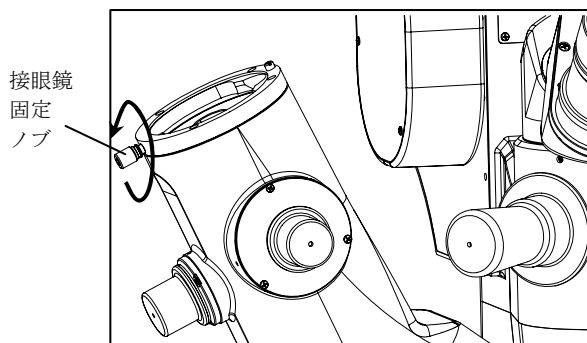


４．４５° 俯視接眼鏡の切り欠きに接眼鏡取付マウント部のピンを差し込みながら、接眼鏡取付マウント部に４５° 俯視接眼鏡を乗せます。

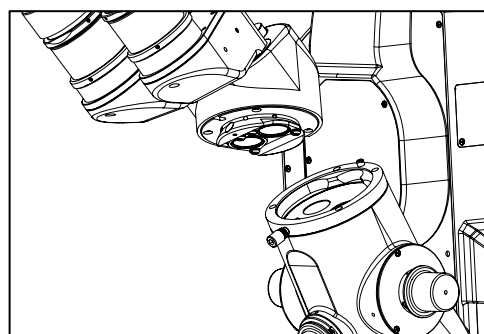

取扱説明書を必ずご参照ください

5. 接眼鏡固定ノブを締付けます。

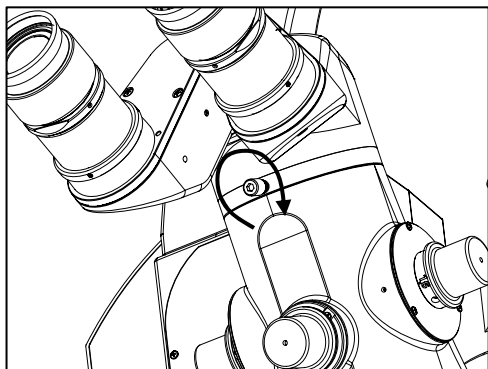

<操作方法>

1. 手術前に回転ロック解除ノブを引ながら助手用顕微鏡を左右どちらかの制限まで回し、助手用顕微鏡の観察方向を決めます。
2. 視度を調節します。
3. 滅菌キャップを所定の各部に取り付けます。
4. 眼幅調節レバーにより眼幅を調整します。
5. 変倍ノブにより倍率を調節します。
6. フォーカスノブにより焦点を合わせます。

【使用上の注意】

基本的注意事項

滅菌キャップは使用前に必ず滅菌すること。

医用電気機器の使用上の注意事項

1. 取扱説明書を熟読し、熟練した者以外は機器を使用しないこと。
2. 機器を設置するときは次の事項に注意すること。
 - (1) 水のかからない場所に設置すること。
 - (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
 - (3) 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意すること。
 - (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
3. 機器の使用前には次の事項に注意すること。

機器を使用する前には、必ず助手用顕微鏡固定ねじ及び接眼鏡固定ノブが確実に締め付けられていることを確認すること。
4. 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - (1) 診断に必要な時間をこえないように注意すること。
 - (2) 機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
 - (3) 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。
 - (4) 機器に患者が触れることのないよう注意すること。
5. 機器の使用後は、次の使用に支障のないよう必ず洗浄しておくこと。
6. 故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行ない、修理は専門家にまかせること。
7. 機器は改造しないこと。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管(非包装(非梱包)状態) *
- 温度: 10°C~40°C
- 湿度: 30%~75%(結露なきこと)
- 気圧: 700hPa~1060hPa
2. 貯蔵・保管(包装(梱包)状態) *
- 温度: -20°C~50°C
- 湿度: 10%~95%
3. 輸送(包装(梱包)状態) *
- 温度: -20°C~50°C
- 湿度: 10%~95%

4. 保管場所については次の事項に注意すること。
 - (1) 水のかからない場所に保管すること。
 - (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
 - (3) 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意すること。
 - (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
5. 耐用期間 *
- 正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年(自己認証[当社データ]による)

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚れを除去し洗浄、消毒、滅菌すること。
2. 機器及び部品は必ず定期点検を行なうこと。
3. しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
4. 対物レンズに指紋や汚れがつかないように気をつけること。
5. 使用しないときは、カバーを被せること。
6. 接眼鏡が汚れたときは、「OMS-710 取扱説明書」の「対物レンズ、接眼鏡のクリーニング」に従い清掃すること。
7. 滅菌キャップは次の方法、条件で滅菌すること。

滅菌方法: 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ滅菌) **

滅菌条件: 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ滅菌)は、121°Cの飽和水蒸気内で25分間又は、132°Cの飽和水蒸気内で5分間。 **

【包装】 *

包装単位: 1台

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

東京都板橋区蓮沼町75番1号

TEL 03-3558-2506

製造業者

株式会社 トプコン