

機械器具（25）医療用鏡

一般医療機器 特定保守管理医療機器

可搬型手術用顕微鏡 JMDNコード36354020

「手術用顕微鏡OMS-800」の付属品

一般医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器

手術用顕微鏡 JMDNコード36354010

「手術用顕微鏡OMS-850」の付属品

35mmカメラリレーレンズ CR-02

【警告】

使用前には、必ず付属品締付リングが確実に締め付けられていることを確認すること。また、35mmカメラとTマウントアダプターの取り付け、及びTマウントアダプターとTマウントの取り付けが確実に行われていることを確認すること。

〔落下により死傷する恐れがあります。〕


付属品の着脱は患者の上で行わないこと。

〔落下により死傷する恐れがあります。〕

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は35mmカメラリレーレンズCR-02（以下、「35mmカメラリレーレンズ」という）のみで構成される。

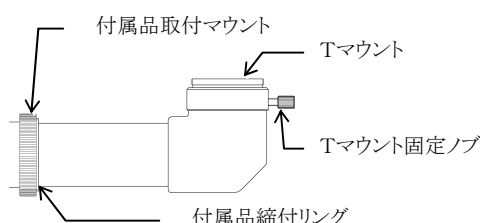

2. 寸法及び質量

寸法：194mm(W)×48mm(D)×66mm(H)

質量：0.32kg

3. 作動原理

観察光学系から分割した像を35mmカメラに結像させる。

【使用目的、効能又は効果】

手術用顕微鏡 OMS-800 又は手術用顕微鏡 OMS-850 と市販の Tマウントアダプター及び市販の 35mmカメラ又は、デジタル一眼レフカメラ*と組み合わせ、観察像を 35mmカメラのフィルム面又は、デジタル一眼レフカメラの撮像素子面に結像する。

※デジタル一眼レフカメラは 35mm フルサイズ

【品目仕様等】

カメラマウント：Tマウント

【操作方法又は使用方法等】

<使用環境>

温度：10℃～40℃

湿度：30%～75%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

<使用方法>

- 手術用顕微鏡 OMS-800 又は手術用顕微鏡 OMS-850 の付属品取付マウントに 35mmカメラリレーレンズを取り付け、付属品締付リングを締め付けて固定します。
- 35mmカメラリレーレンズに市販の Tマウントアダプター及び市販の 35mmカメラを取り付けます。
- Tマウント固定ノブを緩め、カメラを正しい方向にセットします。
- Tマウント固定ノブを締付けて固定します。

詳細は手術用顕微鏡 OMS-800 又は手術用顕微鏡 OMS-850「取扱説明書」の「使うための準備」、「使用中の操作」を参照のこと。

【使用上の注意】

使用上の注意事項

- 機器を設置するときは次の事項に注意すること。
 - 水のかからない場所に設置すること。
 - 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
 - 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
 - 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
- 使用前には、必ず付属品締付リングが確実に締め付けられていることを確認すること。また、35mmカメラとTマウントアダプターの取り付け、及びTマウントアダプターとTマウントの取り付けが確実に行われていることを確認すること。
- 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - 機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
 - 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。
 - 機器に患者が触れることのないよう注意すること。
- 機器の使用後は、次の使用に支障のないよう必ず清掃しておくこと。
- 故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行ない、修理は専門家にまかせること。
- 機器は改造しないこと。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態）
温度：10℃～40℃
湿度：30%～75%（結露なきこと）
気圧：700hPa～1060hPa
- 貯蔵・保管（包装（梱包）状態）
温度：-20℃～50℃
湿度：10%～95%
- 輸送（包装（梱包）状態）
温度：-20℃～50℃
湿度：10%～95%
- 保管場所については次の事項に注意すること。
 - 水のかからない場所に保管すること。
 - 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
 - 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
 - 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 耐用期間
正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから 8 年（自己認証〔当社データ〕による）

【保守・点検に係る事項】

- 機器および部品は必ず定期点検を行なうこと。
- しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

取扱説明書を必ずご参照ください

【包装】

包装単位：1 台

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

東京都板橋区蓮沼町75番1号

T E L 03-3558-2506

製造業者

株式会社 トプコン