


機械器具（22）検眼用器具
 一般医療機器 細隙灯顕微鏡（35148000）

「スリットランプ SL-D2」
 「スリットランプ SL-D4」
 「スリットランプ SL-D7」
 「スリットランプ SL-D8Z」
 「スリットランプ SL-2G」
 「スリットランプ SL-D301」
 「スリットランプ SL-D701」の付属品
 イエローフィルターユニット

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、イエローフィルターユニットのみで構成される。

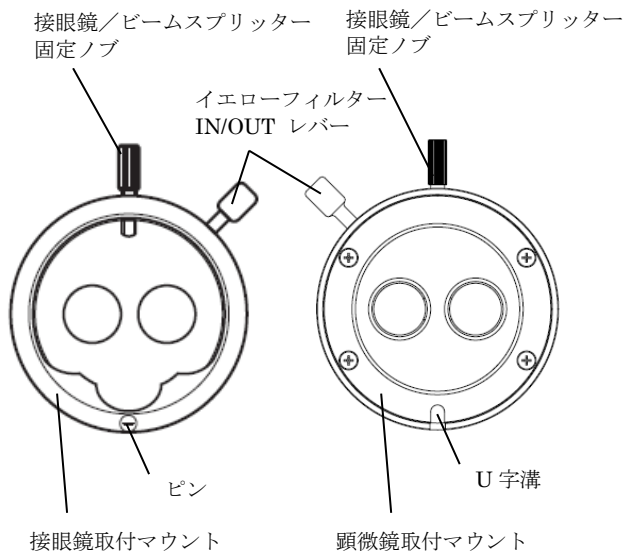

2. 寸法：70mm(W) × 28mm(D) × 88mm(H)

3. 使用環境

温度：10℃～40℃

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

【使用目的又は効果】

バリアフィルターを内蔵しない構成の顕微鏡部に取り付け、照明部に内蔵するブルーフィルターと組み合わせ、蛍光像を観察する。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. スリットランプ本体の顕微鏡部から接眼鏡部の接眼鏡固定ネジを緩めて接眼鏡部を取り外します。
2. 本品の顕微鏡取付マウントをスリットランプ本体の顕微鏡部のピンと本品の U 字溝を合わせてスリットランプ本体の顕微鏡部の接眼鏡固定ネジを締めて本品を取付けます。
3. 上記1.で取り外した接眼鏡部の U 字溝と本品の接眼鏡取付マウントのピンに合わせて本品の接眼鏡／ビームスプリッター固定ノブを締めて接眼鏡部を取り付けます。
4. イエローフィルターIN/OUT レバーを操作して、フィルターの IN/OUT を切り換えます。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

本品が確実に取り付けられていること。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

詳細はスリットランプ本体の「取扱説明書」の「安全に関する全般的な情報」及び「安全に使うための表示と図記号」を熟読し、遵守すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態）

温度：10℃～40℃¹⁾

湿度：10%～95%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

¹⁾ 本機器は、ISO 15004-1 の保管温度条件を満たしておりません。温度が 40℃よりも高くなる場所や、10℃よりも低くなる場所に本機器を保管しないでください。

2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態）

温度：-20℃～50℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

3. 輸送（包装（梱包）状態）

温度：-40℃～70℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

4. 保管場所については次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

5. 耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから 8 年（自己認証〔当社データ〕による）

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常に切換えかつ固定ができることを確認すること。

項目	点検時期	点検内容
点検	使用前	・構成部品が確実に取り付けられていること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい