


機械器具（22）検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡（35148000）スリットランプ SL - D701 の付属品
あご受け SO-CR03B

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、あご受けのみで構成される。
スリットランプ本体のうち、あご受け部とテーブル部がないものと組み合わせる。

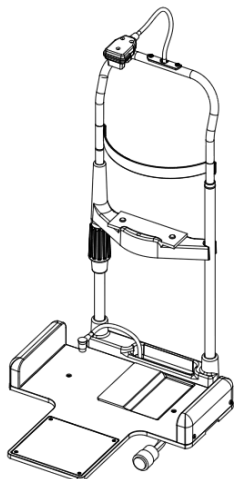

2. 体に接触する部分の組成

額当て：ポリアミド樹脂

あご受け：ポリアミド樹脂

3. 寸法：330(W)×370(D)×565(H)mm

4. 使用環境

温度：10℃～40℃

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

【使用目的又は効果】

本品は、スリットランプ本体のテーブル部に取り付け、被検者のあごを保持するために用いる。

【使用方法等】

<使用方法>

1. 本品をスリットランプ本体のテーブル部に取り付けます。
2. 被検者のあごを“あご受け”の上にのせ、額を“額当て”に当てさせます。
3. 被検者の眼がほぼ高さマークの位置にくるように、“あご受け上下ハンドル”回して調節します。

詳細は、スリットランプ本体の「取扱説明書」を参照のこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

各種付属品の取り付けは確実に行うこと。

〔使用中や移動中に落下し負傷する恐れがあります。〕

<その他の注意>

1. 機器を設置するときは次の事項に注意すること。
 - (1) 水のかからない場所に設置すること。
 - (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
 - (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
 - (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

詳細は「取扱説明書」の「安全に関する全般的な情報」及び「安全に使うための表示と図記号」を熟読し、遵守すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態）

温度：10℃～40℃¹⁾

湿度：10%～95%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

¹⁾ 本機器は、ISO 15004-1 の保管温度条件を満たしておりません。温度が40℃よりも高くなる場所や、10℃よりも低くなる場所に本機器を保管しないでください。

2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態）

温度：-20℃～50℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

3. 輸送（包装（梱包）状態）

温度：-40℃～70℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

4. 保管場所については次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

5. 耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年（自己認証「当社データ」による）

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

項目	点検時期	点検内容
点検	使用前	・あご受け部がテーブル部に確実に取り付けられていること
クリーニング	汚れたとき	・額当て及びあご受け部
補給	必要時	・あご受け紙

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506