

機械器具（２２）検眼用器具 ＊
管理医療機器 特定保守管理医療機器
眼底カメラ JMDN コード １０５５１０００

「眼底カメラ T R C － ５ ０ E X」
「眼底カメラ T R C － ５ ０ I X」
「眼底カメラ T R C － ５ ０ L X」の付属品
T V リレーレンズ

【形状・構造等】


１．構成

本品は、T V リレーレンズのみにより構成される。
本品は、組合せ可能な眼底カメラ、組合せ可能な T V カメラ（市販品）の種類及び台数（１台接続可能なもの、２台接続可能なもの、３台接続可能なもの）により、１２種類ある。組合わせの詳細は表１を参照のこと。

１) T V カメラを１台接続可能なもの



２) T V カメラを２台接続可能なもの

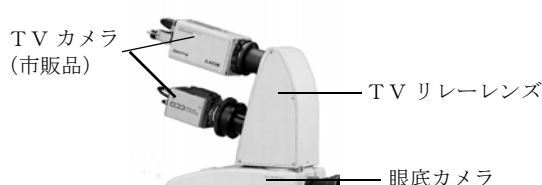

３) T V カメラを３台接続可能なもの



２．寸法及び質量
表１を参照のこと。

【性能、使用目的、効能又は効果】

使用目的

「眼底カメラ T R C － ５ ０ E X」、「眼底カメラ T R C － ５ ０ A X」、「眼底カメラ T R C － ５ ０ I X」、「眼底カメラ T R C － ５ ０ L X」（以下、眼底カメラという。）及び T V カメラ（市販品）と組合せ、画像を T V カメラ（市販品）で撮影するために用いる。

【操作方法又は使用方法等】

- １．本品を眼底カメラに取り付けます。
- ２．本品に T V カメラ市販品を取り付けます。

詳細は眼底カメラの「取扱説明書」の「基本操作」及び「参考資料」を参照のこと。

【使用上の注意】

本品と眼底カメラの固定は、付属品脱着レバーを締付け、ガタがないように固定すること。

〔本品の落下により、けがをする恐れがあります。〕

本品と T V カメラの固定は、カメラマウントを締付け、ガタがないように固定すること。

〔T V カメラの落下により、けがをする恐れがあります。〕

【作動・動作原理】

眼底カメラの撮影光学系に設置し、T V カメラに像を結像させる。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

１．環境条件

温度：１０℃～４０℃

湿度：３０％～８５％（結露なきこと）

気圧：７００hPa～１０６０hPa

２．使用期限

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから８年〔自己認証（当社データ）による〕

【保守点検に係る事項】

- １．本装置および部品は、必ず定期点検を行うこと。
- ２．しばらく使用しなかった装置を再使用するときは、使用前に必ず装置が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 ＊

製造販売業者

株式会社 トプコン

東京都板橋区蓮沼町７５番１号

T E L ０３－３５５８－２５０６

製造業者

株式会社 トプコン山形

表 1 **

摘要	型式	組合せ可能な TVカメラ					組合せ可能な 眼底カメラ				寸法 (mm) W×D×H	質量 (Kg)
		1	2	3	4	5	50EX	50AX	50IX	50LX		
1) TVカメラを 1 台 接続可能なもの	TL-201	○					○	○			85×145×238	1.9
	TL-211					○	○	○			85×123×228	1.8
	TL-221	○						○			85×145×238	2.0
	TL-231			○					○	○	85×161×246	1.7
2) TVカメラを 2 台 接続可能なもの	TL-210D	○	○				○	○			85×173×238	2.3
	TL-222D	○	○					○			85×173×238	2.3
	TL-232D	○		○					○	○	85×186×238	2.4
	TL-233D		○	○					○	○	85×173×246	2.2
	TL-234D			○	○				○	○	85×186×234	2.2
	TL-236D			○		○			○	○	85×198×228	2.4
	TL-238D			○		○	○	○	○	○	85×198×228	2.4
3) TVカメラを 3 台 接続可能なもの	TL-230T	○	○	○					○	○	85×226×255	2.7
	TL-235T		○	○		○			○	○	85×226×255	2.6

○：組合せることができる

組合せ可能な TV カメラ

- 1：1／2型 バヨネットマウント 三板式
 2：2／3型 Cマウント 単板式
 3：1／2型 Cマウント 単板式
 4：1／2型 Cマウント 三板式
 5：23.7×15.6mm サイズ CCD Fマウント 単板式

組合せ可能な眼底カメラ

- 50EX：眼底カメラ TRC－50EX
 50AX：眼底カメラ TRC－50AX
 50IX：眼底カメラ TRC－50IX
 50LX：眼底カメラ TRC－50LX