

機械器具（２２）検眼用器具
管理医療機器 特定保守管理医療機器
眼底カメラ JMDN コード 10551000

＊ ＊

「無散瞳眼底カメラ TRC-NW6S」の付属品 TV リレーレンズ

【形状・構造等】


1. 構成

本品は、マウント形状がソニーマウントと、C マウント、F マウントの
ものがあり、F マウントには単倍タイプと変倍タイプの２種類があ
る。 ＊

(1) TV リレーレンズ（ソニーマウント）




(2) TV リレーレンズ（C マウント）

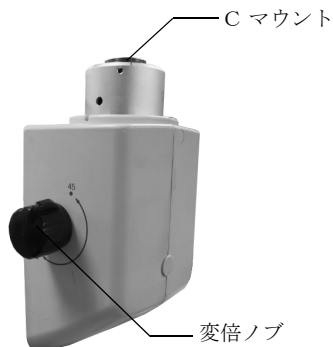

(2) TV リレーレンズ（F マウント） ＊
・単倍タイプ ＊



・変倍タイプ ＊

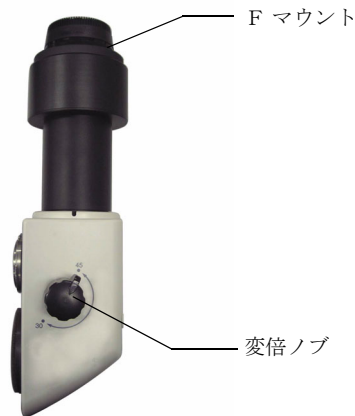

2. 寸法及び質量

- (1) TV リレーレンズ（ソニーマウント） ＊
寸法：130mm(W) × 79mm(D) × 157.5mm(H) ＊
質量：1.2k g
- (2) TV リレーレンズ（C マウント） ＊
寸法：130mm(W) × 79mm(D) × 176.5mm(H) ＊
質量：1.05k g
- (3) TV リレーレンズ（F マウント） ＊
 - ・単倍タイプ
寸法：102mm(W) × 79mm(D) × 223mm(H)
質量：0.85k g
 - ・変倍タイプ
寸法：130mm(W) × 79mm(D) × 275mm(H)
質量：1.5k g

【性能、使用目的、効能又は効果】

1. 性能

- (1) TV リレーレンズ（ソニーマウント） ＊
撮影画角：45°（標準）、30°（標準の1.8倍に拡大）
撮影モード：カラー撮影
- (2) TV リレーレンズ（C マウント） ＊
撮影画角：45°（標準）、30°（標準の1.8倍に拡大）
撮影モード：カラー撮影
- (3) TV リレーレンズ（F マウント） ＊
 - ・単倍タイプ
撮影画角：45°
撮影モード：カラー撮影
 - ・変倍タイプ
撮影画角：45°（標準）、30°（標準の1.8倍に拡大）
撮影モード：カラー撮影

2. 使用目的

無散瞳眼底カメラ TRC-NW6S に本品と TV カメラと組合せ、画像を
TV カメラで撮影するために用いる。

【操作方法又は使用方法等】 ＊

- 1. TV リレーレンズを無散瞳眼底カメラ TRC-NW6S に取付けます。
- 2. 本品に各々のマウントに応じた市販品の TV カメラを取付け取付けま
す。（市販品の TV カメラの取扱説明書を参照ください。）

その他詳細は、無散瞳眼底カメラ TRC-NW6S の「取扱説明書」の「安全上のご注意」、「各部の名称」、「基本操作」及び TV カメラの「取扱説明書」を参照のこと。

【使用上の注意】

1. 本品と無散瞳眼底カメラ TRC-NW6S の固定は、TV リレーレンズ取付けレバーをしっかりと締め付け、TV リレーレンズにガタがないように固定すること。
2. 本品と TV カメラの固定は、ガタがないように固定すること。

その他詳細は、無散瞳眼底カメラ TRC-NW6S の「添付文書」及び「取扱説明書」を参照のこと。

【作動・動作原理】

無散瞳眼底カメラ TRC-NW6S の撮影光学系に設置し、TV カメラの像を結像させる。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 環境条件
温度：10℃～40℃
湿度：30%～85%（結露なきこと）
気圧：700hPa～1060hPa
2. 保管場所については次の事項に注意すること。
(1) 水のかからない場所に保管すること。
(2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
(3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時も含む）など安定状態に注意すること
(4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
3. 使用期限：正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年（自己認証[当社データ]による）

【保守・点検に係る事項】

1. 機器及び部品は必ず定期点検を行なうこと。
2. しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
3. 良い写真を撮影するため、光学部品に指紋や汚れがつかないように気をつけること。
4. TV カメラを取り付けていないときは、マウント部にキャップをすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 **

製造販売業者
株式会社 トプコン
東京都板橋区蓮沼町75番1号
TEL 03-3558-2506

製造業者
株式会社 トプコン山形