

機械器具（22）検眼用器具
管理医療機器 特定保守管理医療機器
眼底カメラ JMDN コード 10551000

＊ ＊

「無散瞳眼底カメラ TRC - NW 6 S」の付属品 スチルカメラリレーレンズ

【形状・構造等】



1. 構成
本品は、スチルカメラリレーレンズ本体のみで構成される。
2. 寸法及び質量
寸法：102mm(W) × 79mm(D) × 222mm(H)
質量：0.85kg

【性能、使用目的、効能又は効果】

1. 性能
撮影画角：45°
撮影モード：カラー撮影
2. 使用目的
無散瞳眼底カメラ TRC-NW6S に本品と市販品のスチルカメラと組合せ、画像をスチルカメラで撮影するために用いる。

【操作方法又は使用方法等】

1. スチルカメラリレーレンズを無散瞳眼底カメラ TRC-NW6S（以下 TRC-NW6S と呼ぶ）に取り付けます。
2. 本品にスチルカメラを取り付けます。（スチルカメラの取扱説明書を参照ください。）

【使用上の注意】

1. 本品と無散瞳眼底カメラ TRC-NW6S の固定は、TV リレーレンズ取付けレバーをしっかりと締め付けガタがないように固定すること。
2. 本品とスチルカメラの固定は、ガタがないように固定すること。

その他詳細は、無散瞳眼底カメラ TRC-NW6S の「添付文書」及び「取扱説明書」を参照のこと。

【作動・動作原理】

無散瞳眼底カメラ TRC-NW6S の撮影光学系に設置し、スチルカメラに像を結像させる。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 環境条件
温度：10 ～ 40
湿度：30 % ～ 85 %（結露なきこと）
気圧：700hPa ～ 1060hPa
2. 保管場所については次の事項に注意すること。
（1）水のかからない場所に保管すること。
（2）気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
（3）傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
（4）化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
3. 使用期限：正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから 8 年（自己認証 [当社データ] による）

【保守・点検に係る事項】

1. 機器及び部品は必ず定期点検を行なうこと。
2. しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
3. 良い写真を撮影するため、光学部品に指紋や汚れがつかないように気をつけること。
4. スチルカメラを外しているときは、マウント部にキャップをすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 ＊ ＊

製造販売業者
株式会社 トプコン
東京都板橋区蓮沼町 7 5 番 1 号
TEL 03 - 3558 - 2506

製造業者
株式会社 トプコン山形