

機械器具（２２）検眼用器具
管理医療機器 特定保守管理医療機器
眼底カメラ JMDN コード 10551000

＊＊


「無散瞳眼底カメラ TRC-NW 6」の付属品 TV リレーレンズ

【形状・構造等】

1. 構成

本品は、マウント形状がソニーマウントのもので単倍タイプ・変倍タイプのもと、マウント形状が C マウントのもので単倍タイプ・変倍タイプの４種類がある。


(1) ソニーマウント TV リレーレンズ（変倍タイプ）

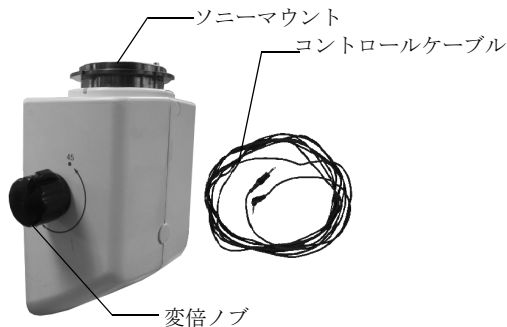


(2) ソニーマウント TV リレーレンズ（単倍タイプ）



(3) C マウント TV リレーレンズ（変倍タイプ）

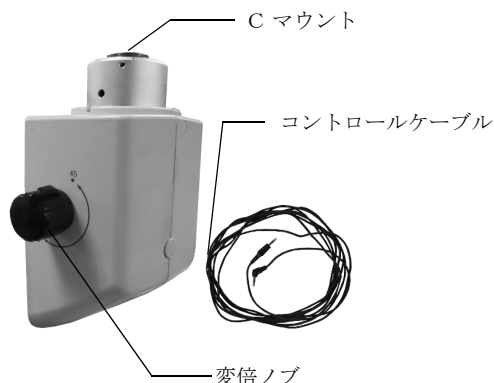

(4) C マウント TV リレーレンズ（単倍タイプ）

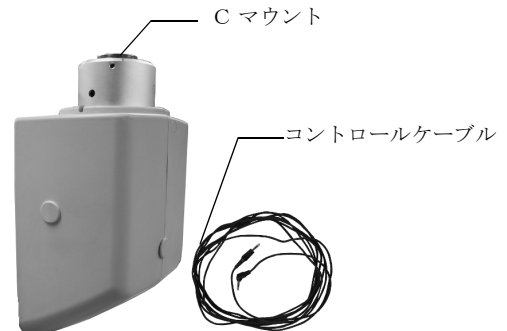

2. 寸法及び質量

(1) ソニーマウント TV リレーレンズ（変倍タイプ）

- ・ TV リレーレンズ
寸法：127mm(W) × 79mm(D) × 158mm(H)
質量：1.2kg
- ・ コントロールケーブル
寸法：5000 ± 100mm

(2) ソニーマウント TV リレーレンズ（単倍タイプ）

- ・ TV リレーレンズ
寸法：102mm(W) × 79mm(D) × 158mm(H)
質量：1.1kg
- ・ コントロールケーブル
寸法：5000 ± 100mm

(3) C マウント TV リレーレンズ（変倍タイプ）

- ・ TV リレーレンズ
寸法：127mm(W) × 79mm(D) × 175.5mm(H)
質量：1.05g
- ・ コントロールケーブル
寸法：5000 ± 100mm

(4) C マウント TV リレーレンズ（単倍タイプ）

- ・ TV リレーレンズ
寸法：102mm(W) × 79mm(D) × 175.5mm(H)
質量：0.7kg
- ・ コントロールケーブル
寸法：5000 ± 100mm

【性能、使用目的、効能又は効果】

1. 性能


- (1) ソニーマウント TV リレーレンズ（変倍タイプ）
撮影画角：45°（標準）、30°（標準の1.8倍に拡大）
撮影モード：カラー撮影
- (2) ソニーマウント TV リレーレンズ（単倍タイプ）
撮影画角：45°
撮影モード：カラー撮影
- (3) C マウント TV リレーレンズ（変倍タイプ）
撮影画角：45°（標準）、30°（標準の1.8倍に拡大）
撮影モード：カラー撮影
- (4) C マウント TV リレーレンズ（単倍タイプ）
撮影画角：45°
撮影モード：カラー撮影

2. 使用目的


無散瞳眼底カメラ TRC-NW6 に本品と市販品の TV カメラと組合せ、画像を TV カメラで撮影するために用いる。

【操作方法又は使用方法等】

1. 無散瞳眼底カメラ TRC-NW6 (以下 TRC-NW6 と呼ぶ) に接続されているポラロイドアタッチメントを、TRC-NW6 のマウントレバーを回転させ取り外します。

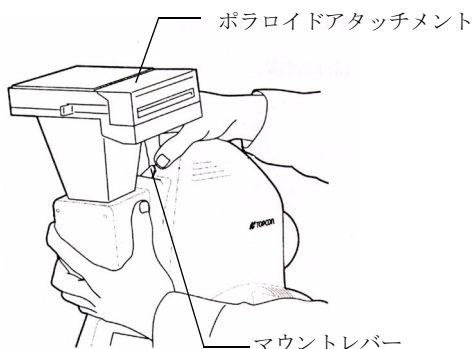

2. TV リレーレンズを TRC-NW6 本体のマウントレバーを液晶モニター側から見て、時計回り方向にいっぱい回転させた状態で、TV リレーレンズを TRC-NW6 本体のピンと TV リレーレンズの溝が合うようにして、TV リレーレンズのマウントをはめ込み、マウントレバーを回し取り付けます。(下図は、ソニーマウント TV リレーレンズ変倍タイプ)

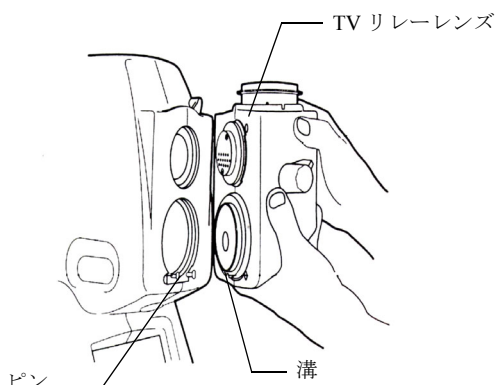

3. ソニーマウントの TV カメラを取り付けるには、TV カメラのマウント部に赤い点と TV リレーレンズのマウントについているピンの位置を合せ、TV カメラのマウントレバーを回し、TV カメラのガタがなくなるように取り付けます。
C マウントの TV カメラの場合は、TV カメラのマウントのネジを回転しなくなるまで回し取り付けます。
4. コントロールケーブルを TV リレーレンズと外部記録装置に接続します。

その他詳細は無散瞳眼底カメラ TRC-NW6 の「取扱説明書」の「安全上のご注意」、「各部の名称」及び TV カメラの「取扱説明書」を参照のこと。

【使用上の注意】

1. 本品と無散瞳眼底カメラ TRC-NW6 の固定は、マウントレバーをしっかり締め付け TV リレーレンズにガタがないように固定すること。
2. 本品と TV カメラの固定は、ガタがないように固定すること。

無散瞳眼底カメラ TRC-NW6 の「添付文書」及び「取扱説明書」を参照のこと。

【作動・動作原理】

無散瞳眼底カメラ TRC-NW6 の撮影光学系に設置し、TV カメラ像を結像させる。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 環境条件
温度：10℃～40℃
湿度：30%～85% (結露なきこと)
気圧：700hPa～1060hPa
2. 保管場所については次の事項に注意すること。
(1) 水のかからない場所に保管すること。
(2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
(3) 傾斜、振動、衝撃 (運搬時も含む) など安定状態に注意すること
(4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
3. 使用期限：正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから 8 年 (自己認証 [当社データ] による)

【保守・点検に係る事項】

1. 機器及び部品は必ず定期点検を行なうこと。
2. しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
3. 良い写真を撮影するため、光学部品に指紋や汚れがつかないように気をつけること。
4. TV カメラを取り付けていないときは、マウント部にキャップをすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 **

製造販売業者
株式会社 トプコン
東京都板橋区蓮沼町 7 5 番 1 号
TEL 03-3558-2506

製造業者
株式会社 トプコン山形