

機械器具（22）検眼用器具
管理医療機器 特定保守管理医療機器
眼底カメラ（10551000）


「眼底カメラTRC-50DX」の付属品
TV リレーレンズ

※【形状・構造及び原理等】


1. 構成

本品は、TV リレーレンズのみにより構成される。
本品は、組合せ可能な市販のTV カメラ、デジタルカメラ
（以下、「電子撮影装置」と総称する）の種類及び台数が異なるものがある。（電子撮影装置を1台接続可能なもの、電子撮影装置を2台接続可能なもの、電子撮影装置を3台接続可能なもの）組合せの詳細は下表を参照のこと。


（1）電子撮影装置を1台接続可能なもの

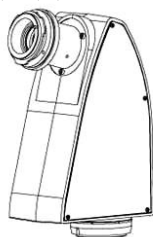

（2）電子撮影装置を2台接続可能なもの

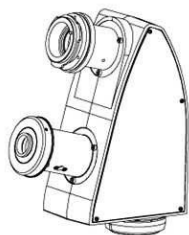

（3）電子撮影装置を3台接続可能なもの

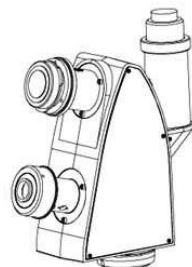

2. 寸法

摘要	型式	組合せ可能な電子撮影装置						寸法(mm) W×D×H
		1	2	3	4	5	6	
1) 電子撮影装置を1台接続可能なもの	TL-201		○					85×145×238
	TL-211					○		85×123×228
	TL-231	○						85×161×246
2) 電子撮影装置を2台接続可能なもの	TL-210D		○		○			85×173×238
	TL-232D	○	○					85×186×238
	TL-233D	○			○			85×173×246
	TL-234D	○		○				85×186×234
	TL-236D	○				○		85×198×228
3) 電子撮影装置を3台接続可能なもの	TL-238D					○	○	85×198×228
	TL-230T	○	○		○			85×226×255
	TL-235T	○			○	○		85×226×255
	TL-237T	○				○	○	85×251×255

○：組合せることができる

組合せ可能な電子撮影装置

- 1/2 型C マウント単板式赤外カメラ
- 1/2 型三板式パヨネットマウント
- 1/2 型C マウント三板式
- 2/3 型Cマウント単板式
- F マウント一眼レフデジタルカメラ
- 1/2 型C マウント単板式

3. 作動原理

電子撮影装置を眼底カメラ TRC-50DX（以下 TRC-50DX という）へ固定するとともに、内蔵する光学系により電子撮影装置に像を結像させる。

4. 使用環境 ※

温度：10°C～40°C
湿度：30%～90%（結露なきこと）
気圧：700hPa～1060hPa

※【使用目的又は効果】

TRC-50DX と組み合わせ、観察像を電子撮影装置の撮像面に結像するために用いる。

※【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 本品を TRC-50DX に取付けます。
2. 本品に電子撮影装置を取付けます。

詳細は TRC-50DX の「取扱説明書」の「基本操作」及び「別売付属品」を参照のこと。

※【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品と TRC-50DX の固定は、TRC-50DX の UPPER マウント脱着レバーを締め付け、ガタがないように固定すること。
[本品の落下により、けがをする恐れがあります]
2. 本品と電子撮影装置の固定は、電子撮影装置のマウントを締め付け、ガタのないように固定すること。
[電子撮影装置の落下により、けがをする恐れがあります]

※【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態） ※

温度：10°C～40°C
湿度：10%～95%（結露なきこと）
気圧：700hPa～1060hPa

2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態） ※

温度：-20°C～50°C
湿度：10%～95%
気圧：700hPa～1060hPa

3. 輸送（包装（梱包）状態） ※

温度：-40°C～70°C
湿度：10%～95%
気圧：700hPa～1060hPa

4. 保管場所については次の事項に注意すること。

- （1）水のかからない場所に保管すること。
- （2）気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- （3）傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- （4）化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

5. 耐用期間 ※

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年（自己認証[当社データ]による）

取扱説明書を必ずご参照下さい

＊ ＊【保守・点検に係る事項】

1. しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. 良い写真を撮るため、光学部品に指紋や汚れがつかないよう気をつけること。
3. 電子撮影装置をT V リレーレンズから外したときは、T V リレーレンズ及び電子撮影装置のマウントにキャップをすること。

＊ ＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506