


機械器具 (22) 検眼用器具
管理医療機器 眼底カメラ (10551000)

特定保守管理医療機器 「眼底カメラ TRC-50DX」 の付属品
TM 変換アダプター

**【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、TM 変換アダプター (型式名 MD-2) のみで構成される。

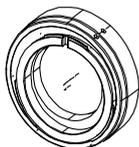

2. 寸法: $\phi 68\text{mm} \times 29.5\text{mm(D)}$

3. 作動原理

デジタルカメラ (市販品) を眼底カメラ TRC-50DX (以下 TRC-50DX という) へ固定する。

4. 使用環境 *

温度: $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

湿度: 30%~90% (結露なきこと)

気圧: 700hPa~1060hPa

**【使用目的又は効果】

本品を TRC-50DX の LOWER マウントに接続し、デジタルカメラ (市販品) 等電子撮像装置と組み合わせ観察像を撮像面に結像するために用いる。

**【使用方法等】

<使用方法>

1. 本品にデジタルカメラ (市販品) を取付けます。
2. 本品を TRC-50DX に取付けます。

詳細は TRC-50DX の「添付文書」及び「取扱説明書」の「基本操作」及び「別売付属品の取付け取外し方法」を参照のこと。

**【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 本品と TRC-50DX の固定は、TRC-50DX の LOWER マウント脱着レバーを締め付け、ガタがないように固定すること。
[本品の落下により、けがをする恐れがあります]
2. 本品とデジタルカメラ (市販品) の固定は、デジタルカメラ (市販品) のカメラマウントを締め付け、ガタのないように固定すること。
[デジタルカメラ (市販品) の落下により、けがをする恐れがあります]

その他詳細は、TRC-50DX の「添付文書」及び「取扱説明書」を参照のこと。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

**【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管 (非包装 (非梱包) 状態) *
温度: $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
湿度: 10%~95% (結露なきこと)
気圧: 700hPa~1060hPa
2. 貯蔵・保管 (包装 (梱包) 状態) *
温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
湿度: 10%~95%
気圧: 700hPa~1060hPa
3. 輸送 (包装 (梱包) 状態) *
温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
湿度: 10%~95%
気圧: 700hPa~1060hPa

4. 保管場所については次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- (3) 傾斜、振動、衝撃 (運搬時を含む) など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

5. 耐用期間 *

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから 8 年 (自己認証 [当社データ] による)

**【保守・点検に係る事項】

1. しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. 良い写真を撮るため、光学部品に指紋や汚れがつかないように気をつけること。
3. デジタルカメラを外しているときは、M マウントにキャップをすること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 トプコン
TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい