


機械器具（22）検眼用器具
管理医療機器 眼底カメラ（10551000）

特定保守管理医療機器「眼底カメラTRC-50DX」の付属品
1倍リレーレンズ

※※【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、1倍リレーレンズと1倍リレーレンズケーブルにより構成される。（型式名；OR-2）

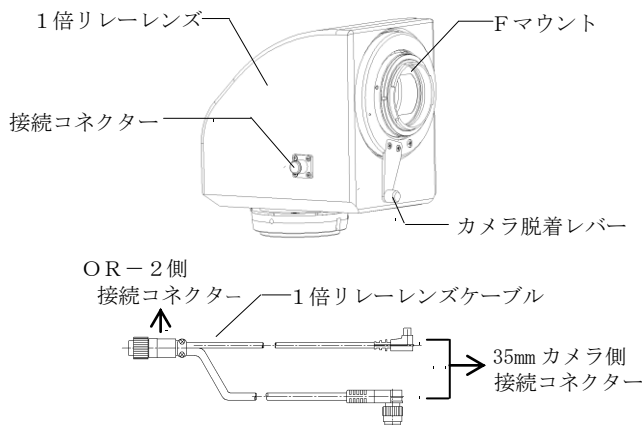

2. 寸法：106mm(W) × 140mm(D) × 141mm(H)

3. 作動原理

本品を眼底カメラ TRC-50DX（以下 TRC-50DX という）の撮影光学系に設置し、増設した 35mm フィルムカメラに像を結像させる。

4. 使用環境 ※

温度：10℃～40℃

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

※※【使用目的又は効果】

TRC-50DX の UPPER マウントに接続し、35mm フィルムカメラ（市販品）と組み合わせ観察像を 35mm フィルムに撮影する。

※※【使用方法等】

＜使用方法＞

1. TRC-50DX の UPPER マウントに本品を取付け、TRC-50DX の UPPER マウント着脱レバーを回し締め付け固定します。
2. F マウントに 35mm フィルムカメラ（市販品）をカメラ脱着レバーを回し締め付け固定します。（取付けには 35mm フィルムカメラの取扱説明書も参照ください。）
3. 本品に付属されている 1倍リレーレンズケーブルを本品と 35mm フィルムカメラに接続します。

その他詳細は TRC-50DX の「添付文書」及び「取扱説明書」を参照のこと。

※※【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品と TRC-50DX の固定は、TRC-50DX の UPPER マウント脱着レバーをしっかり締め付けガタがないように固定すること。
2. 本品と 35mm フィルムカメラ（市販品）との取付けは、ガタがないように固定すること。
[35mm カメラの落下により、けがをする恐れがあります]
その他詳細は、TRC-50DX の「添付文書」及び「取扱説明書」を参照のこと。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

※※【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態） ※

温度：10℃～40℃

湿度：10%～95%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態） ※

温度：-20℃～50℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

3. 輸送（包装（梱包）状態） ※

温度：-40℃～70℃

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

4. 保管場所については次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

5. 耐用期間 ※

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから 8 年（自己認証 [当社データ] による）

※※【保守・点検に係る事項】

1. しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. 良い写真を撮るため、光学部品に指紋や汚れがつかないように気をつけること。
3. 35mm カメラを外しているときは、F マウントにキャップをすること。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい

4059691022-17092901