


機械器具（22）検眼用器具
管理医療機器 眼底カメラ（10551000）

特定保守管理医療機器「眼底カメラTRC-50DX」の付属品
グリーンフィルターアタッチメント

※※【形状・構造及び原理等】

1. 構成
グリーンフィルターアタッチメントは、型式名 GF-1、GF-2
の2種類がある。

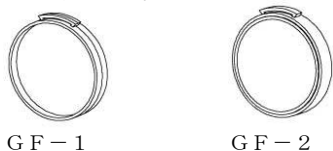

2. 寸法
・GF-1
35.4mm(W) × 6mm(H), φ31mm
・GF-2
35.4mm(W) × 6.3mm(H), φ31mm

3. 作動原理
眼底カメラ TRC-50DX（以下"TRC-50DX" という）の照明
光学系に挿入し、無赤色撮影を行う。

4. 使用環境 ※
温度：10°C～40°C
湿度：30%～90%（結露なきこと）
気圧：700hPa～1060hPa

5. 耐用期間 ※

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年
（自己認証〔当社データ〕による）

※※【保守・点検に係る事項】

本品の取付け、取外しの際は、フィルターに指紋や汚れ、きず
がないことを確認すること。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 トプコン
TEL 03-3558-2506

※※【使用目的又は効果】

TRC-50DX と組み合わせ、無赤色撮影のために用いる。

※※【使用方法等】

＜使用方法＞

詳細は TRC-50DX の「添付文書」及び「取扱説明書」の「基
本操作」及び「別売付属品の取付け取外し方法」を参照のこと。

※※【使用上の注意】

1. 本品を TRC-50DX に取付ける際は、所定の位置に確実に
取付けたことを確認すること。
2. 本品を取り扱う際は、フィルターにきずや指紋がつかない
ように気をつけること。

その他詳細は、TRC-50DX の「添付文書」及び「取扱説明書」
を参照のこと。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の
条例に従うこと。

※※【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態） ※
温度：10°C～40°C
湿度：10%～95%（結露なきこと）
気圧：700hPa～1060hPa
2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態） ※
温度：-20°C～50°C
湿度：10%～95%
気圧：700hPa～1060hPa
3. 輸送（包装（梱包）状態） ※
温度：-40°C～70°C
湿度：10%～95%
気圧：700hPa～1060hPa
4. 保管場所については次の事項に注意すること。
(1) 水のかからない場所に保管すること。
(2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオ
ウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない
場所に保管すること。
(3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意
すること。
(4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない
こと。

取扱説明書を必ずご参照下さい