

機械器具（22）検眼用器具  
管理医療機器 眼底カメラ（10551000）

特定保守管理医療機器「無散瞳眼底カメラ TRC-NW8」の付属品  
専用ソフトウェア

【形状・構造及び原理等】

「無散瞳眼底カメラ TRC-NW8」の添付文書を参照のこと。

【使用目的又は効果】

瞳孔を通じて眼底を観察、撮影、又は記録する。

【使用方法等】

本ソフトウェアは、「無散瞳眼底カメラ TRC-NW8」の付属品であるパソコンにインストールし、「無散瞳眼底カメラ TRC-NW8」本体（以下「本体」）で撮影した画像を表示、保存、及び印刷するために使用する。

＜使用準備＞

1. USB ケーブル（市販品）を介してパソコンを本体の画像端子または画像・データ端子に接続する。
2. パソコンの電源を入れる。
3. パソコンの画面上のアイコンをクリックし、専用ソフトウェアを起動する。

＜操作＞

1. 専用ソフトウェアを操作し、被検者の ID を入力する。
2. 本体を操作し、観察光量の設定、撮影光量の設定、視度補正レンズの切換えなど、各種設定を行う。
3. 本体を操作し、撮影を行う。撮影した画像が自動的にパソコンの画面上に表示される。
4. 必要に応じてパソコンの画面上の印刷アイコンを押し、画像を印刷する。
5. 必要に応じて、パソコンの画面上の保存アイコンをクリックし、撮影した画像をパソコンに保存する。
6. 必要に応じて 1～5 を繰り返す。

＜終了＞

1. パソコンの画面上の終了アイコンをクリックして本ソフトウェアを終了させる。
2. 「無散瞳眼底カメラ TRC-NW8」本体の電源を切る。
3. パソコンの電源を切る。

詳細はインストール手順書の「インストール手順」、「無散瞳眼底カメラ TRC-NW8」本体の取扱説明書、及び本ソフトウェアの取扱説明書の「Ez Capture for TRC-NW8 の操作」を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン  
TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい