

インレーワックス

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕
本品は、用途別にレギュラー、ハード、No.6 の 3 種類がある。
ブルー、グリーン、レッド、イエローの 4 色があり、それぞれ棒
状及び缶入りがある。

〔成分〕
パラフィン、植物性ワックス、着色料

〔原理〕
加温により軟化、熔融し、冷却により凝固する。

【使用目的又は効果】

インレー及びクラウン鑄造用ろう型の製作

タイプ	特 性
レギュラー	室温で間接法に使用する。 強靱かつ柔軟で彫刻性に優れている。伸 びがあり、綺麗な鑄造面を作り、バーニ ッシングを容易にする。
ハード	流動性を低くしてあるため、気温の高い 時の一般的な作業に適している。
No.6	流動性はレギュラータイプとほぼ同じで あるが、カービングに最も適した硬度と 物性を備えているため、ミリングテクニ ックに適している。また、適度な粘性で ワックス仕上げが容易である。

【使用方法等】

〔使用方法〕
1. 石こう模型上でワックスアップを行う場合は、予めワック
ス用分離材を塗布する。
2. 湯煎または火炎で本品を軟化、熔融し、指で圧接するか、
またはインストルメントで築盛する。完全に硬化するまで
1～2 分間圧接すると、さらに良い適合のパターンが製作で
きる。
3. ワックスが冷却した後、インストルメントで形態を付与する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕
1. ワックスが完全に熔融したら、加熱を止めること。
2. 他の製品と混用しないこと。

【使用上の注意】

本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意する
こと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光を避けて室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 東京歯科産業株式会社
電話番号 03-3831-0176(代)
製造業者 ウイップミックス社
(Whip Mix Corporation)
国名 アメリカ合衆国