

機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工用トリマ JMDN 70741000

モデルトリマー12 インチ型

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

本品は、モーターで回転する 12 インチのディスクを備えている。オプション品として、自動注水電磁弁、ウォータースプレー、スプラッシュ・シールドがある。



寸法：横幅 40.5cm x 高さ 43.0cm x 奥行き 38.0cm
重量：24.0kg

〔電氣的定格〕

電 圧：AC100-115V, 50/60Hz
消費電流：9.2A
電撃に対する保護の形式：クラス I
電撃に対する保護の程度：B 形

〔原理〕

モーターで回転するディスクに石こう模型を押し当てることによりトリミングする。

【使用目的又は効果】

顎態模型、平行模型等の石こうのトリミングに使用し、作業中にディスクの目詰まり及び過熱を防ぐための注水（排水）機能を備える。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照すること。

〔使用方法〕

1. 注水部と水道の元栓を、注水ホースを用いて接続する。
2. トレーテーブルの角度を調整する。
3. 電源を入れてディスクを回転させる。
4. 注水部のバルブで注水量を調節する。（水のオン/オフは水道の元栓で行う。）
5. 石こう模型をトレーテーブルに載せ、ディスクに押し当ててトリミングする。
6. 定められた手順により操作スイッチ、ダイヤルなどを使用前の状態に戻した後、電源を切る。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

1. 回転しているディスクには触れないこと。
2. 石こう模型をディスクに押し付ける際、過度に力を加えないこと。
3. 排水は直接下水に流さず、必ず石こうトラップを設けること。

【使用上の注意】

詳細は取扱説明書を参照すること。

1. 本品を使用する際は、粉塵を吸入しないように、局所吸塵装置、防塵マスク等を使用すること。
2. 目の損傷を防ぐため、保護眼鏡等を使用すること。
3. 衣服や毛髪が引き込まれないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔使用環境〕

標高：2000m以下
温度：5 - 40℃
相対湿度：温度 31℃までは 80%以下
温度 31℃を超える場合は直線的に減少し、40℃で 50%以下

〔保管方法〕

1. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等に対する安全状態に注意すること。
2. 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

〔耐用期間〕

6 年（保証期間ではない）

【保守・点検に係る事項】

詳細は取扱説明書を参照すること。

1. しばらく使用しなかった本品を再使用するときには、使用前に正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. トリミング能力が低下した場合は、ディスクを交換するか、またはディスクを裏返しにすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
電話番号	03-3831-0176(代)
製造業者	ウィップミックス社 (Whip Mix Corporation)
国名	アメリカ合衆国