

機械器具 49 医療用穿刺器，穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル JMDN 35170000


ブッシュ マンドレル

【形状・構造及び原理等】

【形状】

本品は、ネジ、ワッシャー、軸から成り、ストレートハンドピース（HP）用である。

303RS/050

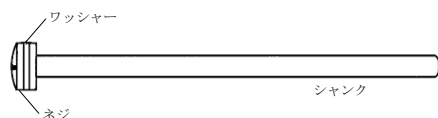

全長：44.50mm（許容差±0.50mm）

1. ネジ

直径：5.00mm

2. 軸

外径：2.35mm（+0、-0.01mm）

軸規格：JIS T 5504-1 軸部形式2（HP用）

【材質】

ステンレス

【原理】

本品に研削材を取り付け、歯科技工用ハンドピース及びレーズに装着し、回転させ、歯科用補綴物を研削、研磨する。


【使用目的又は効果】

歯科技工用ホイール又はジスク等の研削材を取り付けるシャフト

【使用方法等】

【使用方法】

1. 軸からネジを取り外し、歯科技工用ホイール又はジスク等の研削材を取り付ける。

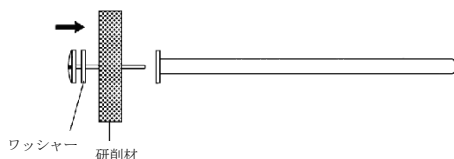

2. さらに、歯科技工用ハンドピース及びレーズに装着し、回転させ、歯科用補綴物を研削、研磨する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 歯科技工専用であり、口腔内で使用しないこと。
2. ハンドピースに装着する際は、メーカーの指示に従って、軸を確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
3. 右（時計方向）回転で使用すること。
4. 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
5. 破折、変形することがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

取り付けるホイール又はジスクの最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 消毒する場合はアルコールで拭くこと。
2. 消毒液に長時間浸すと錆の原因になるので、注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
電話番号	03-3831-0176(代)
製造業者	ブッシュ社 (BUSCH & CO. KG)
国名	ドイツ