

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス JMDN 16189000

アルモア・マージンワックス

【形状・構造及び原理等】

本品は缶入りのワックスであり、レッド色である。

【成分】

パラフィン、微結晶パラフィン、ポリエチレン、ハイドロカーボンレジン

【物質的性質】

融点：71.6℃

【原理】

加熱により軟化、溶融し、冷却により凝固する。

【使用目的又は効果】

マージンのワックス形成

【使用方法等】

【使用方法】

1. 歯形にワックス用分離材を塗布する。
2. インレーワックスを用いて必要な歯冠部形態を付与する。
3. 本品を軟化させ、インスツルメントでマージン全体に築盛し、硬化するまで軽く圧接する。
4. 余分なワックスをインスツルメントを用いて除去する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

完全に溶融した後は、加熱を止めること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

本品は可燃性であるので、使用の際は火傷をしないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光を避けて室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
電話番号	03-3831-0176(代)
*製造業者	ヘーガーワールドワイド社 (Hager Worldwide, Inc.)
国名	アメリカ合衆国