


歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN 70903000

## ブッシュ ポリッシャー

### 【禁忌・禁止】

- 本品の成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

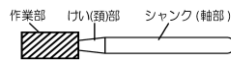

#### 1. 寸法

シャックタイプ	軸径(mm)	全長(mm)
RA (CA)	2.35	22

#### 2. 製品モデル

形態 No.	シャックタイプ	最高許容回転速度 (rpm)	推奨回転速度 (rpm)
コンポジット用			
9587 060	RA (CA)	20,000	3,000~8,000
9588 030			
9589 040			
9591 140			
9583 055			
9577 060	RA (CA)		
9578 030			
9579 040			
9581 140			
9593 055			
ジルコニア用			
9907 060	RA (CA)	20,000	7,000~10,000
9908 030			
9909 040			
9911 140			
9917 060			
9918 030			
9919 040			
9921 140			
セラミック用			
9807 060	RA (CA)	20,000	7,000~10,000
9808 030			
9809 040			
9811 140			
9817 060			
9818 030			
9819 040			
9821 140			

#### 【原材料】

作業部：炭化ケイ素、ダイヤモンド砥粒、その他  
軸部：ステンレス鋼

#### 【原理】

歯科用ハンドピースの回転により、作業部を断続的に被切削物に押し付けることにより研削、研磨する。

### 【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合された様々な研磨成分からなる歯科用研磨材であり、被研磨物を研磨する。

### 【使用方法等】

#### 【使用方法】

- 使用前に本品を滅菌する。滅菌方法及び洗浄方法については、【保守・点検に係る事項】を参照すること。
- 歯科用ハンドピースに装着し、回転させて研削、研磨する。  
【使用方法に関連する使用上の注意】
- ハンドピースが正常に作動することを確認すること。ハンドピースに装着する際は、ハンドピースメーカーの指示に従って、軸を確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- 最大許容回転数を超えて使用しないこと。
- 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 破折、変形することがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 患者の口腔内で使用する場合は、冷却水が不足すると施術部が加熱状態になり歯牙に損傷を与える可能性があるため、十分に冷却水を供給しながら、ソフトタッチで断続的に使用すること。

### 【使用上の注意】

#### 【使用注意】（次の患者には慎重に適用すること）

化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。

#### 【重要な基本的注意】

- 使用前に必ず洗浄・滅菌をすること。（保守・点検に係る事項参照）
- 毎回使用前に、損傷、変形、錆、表面キズ、曲がり及び汚染等がないことを確認し、損傷等がある場合は使用しないこと。
- 本品を使用して研磨する際は、粉塵を吸引しないように局所吸塵装置、防塵マスク等を使用すること。
- 切削屑が目に入らないように保護眼鏡等を使用すること。
- 必要に応じて超音波洗浄を行うこと。
- オートクレーブ滅菌中及び滅菌後の錆を防ぐため、防錆剤を必要に応じて使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

- 使用後は下記の手順により、洗浄、滅菌すること。
  - 流水下で最低1分洗浄し、血痕や組織片その他の汚れを完全に除去する。
  - 自動洗浄消毒器で洗浄・消毒する。完了後乾燥していることを確認する。
  - 目視にて器具の損傷、摩耗および残留物がないか確認する。損傷、摩耗がある器具は廃棄し、残量物が残っている器具は再度洗浄・消毒する。
  - 高圧蒸気滅菌器（オートクレーブ）で、滅菌する。  
（EN13060に準拠したクラスBの滅菌器を推奨）  
設定パラメーター：最低温度132℃、最低保留時間3分  
最低乾燥時間20分
- 消毒液に浸すと錆の原因になるので消毒液には浸さないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 東京歯科産業株式会社  
電話番号 03-3831-0176(代)  
製造業者 ブッシュ社(BUSCH&CO. KG)  
国名 ドイツ