



2B701-952JA*J

**2023 年 10 月改訂 (第 11 版)

*2023 年 6 月改訂 (第 10 版)

認証番号 225ACBZX00047000

機械器具 1 2 理学診療用器具
管理医療機器 手持型体外式超音波診断用プローブ JMDN 40768000

特定保守管理医療機器 リニア式電子スキャンプローブ 18L7 PLU-1204BT

【禁忌・禁止】

適用対象 (患者)

- ・ 次の被検者、部位には使用しないこと
眼球への適用
[眼球への適用を意図して設計しておらず、過大な超音波出力により、白内障、眼構造の損傷等、患者に重篤な健康被害を及ぼすおそれがあるため]

【形状・構造及び原理等】

〈構成〉

1) 標準構成


- ・ プローブ本体
- ・ キャリングケース
- ・ 付属品 (ケーブルクランプ等)
- ・ 取扱説明書
- ・ 洗浄・消毒・滅菌ガイド

2) オプション

- ・ ソノカブラ UACK-003A
- ・ ソノカブラ UACK-004A

詳細はプローブ付属の取扱説明書を参照すること。

〈各部の名称〉

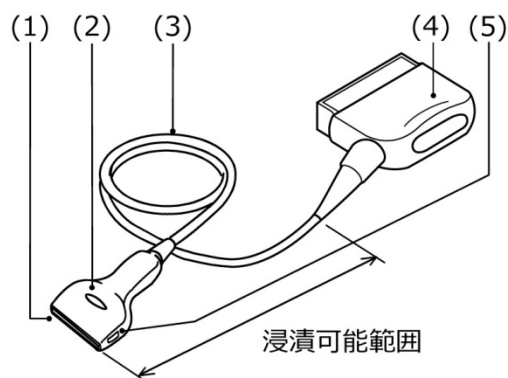

- (1) ヘッド
- (2) グリップ
- (3) ケーブル
- (4) コネクタ
- (5) 穿刺アダプタ固定突起

・ 患者に接触する部分とその原材料

- (1) ヘッド : シリコンゴム
シリコン RTV
変性ポリフェニレンオキサイド
樹脂

オプション ソノカブラ使用時
: スチレン系エラストマー

〈機器の分類〉

- ・ 電撃に対する保護の形式による分類
: クラス I 機器
- ・ 電撃に対する保護の程度による装着部の分類
: BF 形装着部を持つ機器
- ・ 水又は粒子状汚染物質の有害な浸入に対する
保護の程度による分類
: IPX7 (コネクタ部を除く)

〈本体寸法〉

寸法 (単位: mm)
ヘッド、グリップ
: 54.1(幅)、27.6(高さ)、101(奥行)
(奥行はブッシュを除いた長さ)

ケーブル : 1950(長さ)

〈作動・動作原理〉

超音波診断装置に用いて、超音波振動子を順次駆動して超音波ビームを放射し、生体からの反射エコーを受信して、生体の断層像を得るための、超音波プローブである。

【使用目的又は効果】

超音波を用いて体内の形状、性状又は動態を可視化し、画像情報を診断のために提供する装置に使用するプローブである。

〈使用目的又は効果に関する使用上の注意〉

本製品は心臓への直接適用を意図していない。

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

【使用方法等】

〈使用方法〉

このプローブは、超音波診断装置に接続して使用する。装置電源を投入し、身体が無損傷の体表上のスキャンしたい部位にプローブをあてることにより、リアルタイムに装置モニタ上に断層像が表示できる。

穿刺アダプタ又はソノカブラを組み合わせで使用することができる。

穿刺アダプタとソノカブラは併用できない。

1) おもな操作方法を以下に述べる。

- (1) 感染防止のための保護手袋（洗浄・消毒・滅菌用）を着用する。
- (2) プローブを洗浄する。（又は、洗浄・消毒・滅菌されていることを確認する。）
- (3) 保護手袋（洗浄・消毒・滅菌用）を破棄する。
- (4) 感染防止のための保護手袋（検査用）を着用する。
- (5) 電源投入前の始業点検を実施する。
- (6) プローブを超音波画像診断装置に接続する。
- (7) 超音波画像診断装置の電源を入れる。
- (8) 電源投入後の始業点検を実施する。
- (9) プローブに安全性の確認された超音波ゲルを塗布する。
- (10) プローブを無損傷の体表上のスキャンしたい部位にあて、超音波画像を確認する。
- (11) 超音波画像診断装置でモード及び周波数を切り替えて最適な画像に調整する。
- (12) 必要な画像を表示し、必要に応じてデータを保存する。
- (13) 超音波画像診断装置の電源を切る。
- (14) プローブに残っている超音波ゲルを拭き取る。
- (15) プローブを超音波画像診断装置から取り外す。
- (16) プローブを洗浄し、乾燥させる。
- (17) 必要に応じて消毒又は滅菌をする。
- (18) 終業点検を実施する。

2) 穿刺アダプタを組み合わせで使用する場合のおもな操作方法を以下に述べる。

- (1) 感染防止のための保護手袋（洗浄・消毒・滅菌用）を着用する。
- (2) プローブを滅菌する。（又は滅菌されていることを確認する。）
- (3) 穿刺アダプタ（ブラケット）が滅菌されていることを確認する。滅菌されていない場合は、滅菌を行う。
- (4) 穿刺アダプタ（ニードルガイド）の滅菌包装に異常がないことを確認する。
- (5) 保護手袋（洗浄・消毒・滅菌用）を破棄する。
- (6) 感染防止のための保護手袋（検査用）を着用する。

- (7) 電源投入前の始業点検を実施する。
- (8) プローブを超音波画像診断装置に接続する。
- (9) 超音波画像診断装置の電源を入れる。
- (10) 電源投入後の始業点検を実施する。
- (11) プローブに穿刺アダプタ（ブラケット）を装着する。
- (12) プローブに穿刺アダプタ（ニードルガイド）に付属している安全性の確認された滅菌済みの超音波ゲルを塗布する。
- (13) プローブに穿刺アダプタ（ニードルガイド）に付属している安全性の確認された滅菌済みのプローブシースを装着する。
- (14) プローブに穿刺アダプタ（ニードルガイド）を装着する。
- (15) プローブを無損傷の体表上の穿刺したい部位にあて、超音波画像を確認する。
- (16) 超音波画像診断装置でモード及び周波数を切り替えて最適な画像に調整する。
- (17) 超音波画像診断装置を操作して、画面にニードルマーク※を表示する。
- (18) 必要な画像を表示し、穿刺アダプタのニードルガイドに穿刺針を挿入し、ニードルマーク※と穿刺針の画像を確認しながら穿刺を行う。
- (19) 穿刺針をニードルガイドから外す。
- (20) 超音波画像診断装置の電源を切る。
- (21) プローブから穿刺アダプタ（ブラケット）、プローブシース、穿刺アダプタ（ニードルガイド）を取り外す。
- (22) 穿刺アダプタ（ニードルガイド）とプローブシースを感染性廃棄物として廃却処分する。
- (23) プローブに残っている超音波ゲルを拭き取る。
- (24) プローブを超音波画像診断装置から取り外す。
- (25) プローブ及びブラケットを洗浄し、乾燥させる。
- (26) プローブ及びブラケットを滅菌する。
- (27) 終業点検を実施する。

※AccuSITE 及び Infiniti 使用時にはニードルマークは表示されない。

3) ソノカブラを組み合わせで使用する場合のおもな操作方法を以下に述べる。

- (1) 感染防止のための保護手袋（洗浄・消毒・滅菌用）を着用する。
- (2) プローブを洗浄する。（又は、洗浄・消毒・滅菌されていることを確認する。）
- (3) 保護手袋（洗浄・消毒・滅菌用）を破棄する。
- (4) 感染防止のための保護手袋（検査用）を着用する。
- (5) 未使用のソノカブラを準備する。
- (6) 電源投入前の始業点検を実施する。

- (7) プローブを超音波画像診断装置に接続する。
- (8) 超音波画像診断装置の電源を入れる。
- (9) 電源投入後の始業点検を実施する。
- (10) プローブにソノカブラを装着する。
- (11) ソノカブラに超音波ゲルを塗布する。
- (12) ソノカブラを無損傷の体表上のスキャンしたい部位にあて、超音波画像を確認する。
- (13) 超音波画像診断装置でモード及び周波数を切り替えて最適な画像に調整する。
- (14) 必要な画像を表示し、必要に応じてデータを保存する。
- (15) 超音波画像診断装置の電源を切る。
- (16) プローブからソノカブラを取り外す。
- (17) ソノカブラを廃棄処分する。
- (18) プローブを超音波画像診断装置から取り外す。
- (19) プローブを洗浄し、乾燥させる。
- (20) 必要に応じて消毒又は滅菌をする。
- (21) 終業点検を実施する。

〈使用条件〉

- ・周囲温度 : 5℃～35℃
- ・相対湿度 : 30%～85% (結露状態を除く)
- ・気圧 : 700 hPa～1060 hPa

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

- 1) プローブは衝撃に弱く、容易に破損する可能性があるため、慎重に取り扱うこと。
- 2) 超音波出力について
次の注意事項に従い、超音波の熱的、機械的作用をよく理解したうえで使用すること。
超音波出力は、診断可能な範囲で、できる限り低レベルに設定すること。また、検査時間を短くする等の配慮をすること。
- 3) プローブが損傷することを避けるため、取扱説明書に記載した超音波ゲルを使用すること。
- 4) 故障の原因となるのでプローブコネクタ部は濡らさないこと。
- 5) 感染や衛生の注意が必要な臨床環境で使用する場合には必ずプローブシースを使用すること。

** 〈組み合わせて使用可能な機器〉

以下の機器に接続することができる。

販売名 : 超音波診断装置 Aplio beyond
CUS-ABE00
認証番号 : 305ADBZX00067000
製造販売業者 : キヤノンメディカルシステムズ株式会社

販売名 : 超音波診断装置 Aplio me
CUS-AME00
認証番号 : 305ADBZX00027000
製造販売業者 : キヤノンメディカルシステムズ株式会社

販売名 : 超音波診断装置 Aplio flex
CUS-AFL00
認証番号 : 303ACBZX00036000
製造販売業者 : キヤノンメディカルシステムズ株式会社

販売名 : 超音波診断装置 Aplio go
CUS-AGG00
認証番号 : 303ACBZX00037000
製造販売業者 : キヤノンメディカルシステムズ株式会社

販売名 : 超音波診断装置 Xario 200G
CUS-X200G
認証番号 : 230ACBZX00007000
製造販売業者 : キヤノンメディカルシステムズ株式会社

販売名 : 超音波診断装置 Xario 100G
CUS-X100G
認証番号 : 230ACBZX00006000
製造販売業者 : キヤノンメディカルシステムズ株式会社

販売名 : 超音波診断装置 Xario 200
TUS-X200
認証番号 : 225ACBZX00030000
製造販売業者 : キヤノンメディカルシステムズ株式会社

販売名 : 超音波診断装置 Xario 200
TUS-X200S
認証番号 : 225ACBZX00031000
製造販売業者 : キヤノンメディカルシステムズ株式会社

販売名 : 超音波診断装置 Xario 100
TUS-X100
認証番号 : 225ACBZX00065000
製造販売業者 : キヤノンメディカルシステムズ株式会社

販売名 : 超音波診断装置 Xario 100
TUS-X100S
認証番号 : 225ACBZX00066000
製造販売業者 : キヤノンメディカルシステムズ株式会社

CIVCO 社製 Ultra-Pro II ニードルガイダンスシステム
製造販売業者 : センチュリーメディカル株式会社

販売名 : シブコ UP シリーズブラケット
製品番号 : 680-088※
届出番号 : 13B1X00089040233

販売名 : シブコ UP シリーズニードル
ガイド
製品番号 : 610-608※
認証番号 : 231AFBZX00012000

※上記 2 製品 (680-088 と 610-608) はセット
で使用する。

CIVCO 社製 Infiniti Plus™ニードルガイダンス
システム

製造販売業者 : センチュリーメディカル
株式会社

販売名 : シブコ Infiniti ブラケット
製品番号 : 680-122※
届出番号 : 13B1X00089040221

販売名 : シブコ Infiniti ニードルガイド
製品番号 : 610-1235※
認証番号 : 223AFBZX00005000

販売名 : シブコ Infiniti ニードルガイド
製品番号 : 610-1231※
認証番号 : 223AFBZX00005000

※上記 2 製品 (680-122 と 610-1235 及び
680-122 と 610-1231) はセットで使用する
こと。

CIVCO 社製 AccuSITE™ニードルガイダンス
システム

製造販売業者 : センチュリーメディカル
株式会社

販売名 : シブコ AccuSITE™ブラケット
製品番号 : 680-171※
届出番号 : 13B1X00089040220

販売名 : シブコ AccuSITE™ニードル
ガイド
製品番号 : 610-1017※/610-1018※
/610-1019※
認証番号 : 221AFBZX00131000

※上記 2 製品 (680-171 と 610-1017 及び
680-171 と 610-1018 及び 680-171 と
610-1019) はセットで使用する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 指定された機器以外の装置を接続した場合、所定の EMC 性能 (電磁両立性) を発揮できないおそれがあるので指定機器以外は接続しないこと。
- 2) 本装置の傍で携帯電話等、電磁波を発生する機器の使用は、装置に障害を及ぼすおそれがあるので使用しないこと。

〈妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用〉
妊婦、妊娠の疑いのある者及び小児へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に行うこと。
超音波出力について、胎児に対する高出力、長時間の使用、特に妊娠初期の胎児への使用は、慎重に適用すること。

〈その他の注意〉

この製品を廃棄する場合は産業廃棄物となる。使用後、未滅菌で廃棄した場合、特別管理産業廃棄物となるおそれがある。必ず、地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

不明な場合は、最寄りのサービスセンタに相談すること。

この他にもこの装置を使用するに当たっての注意事項が取扱説明書に記載してある。使用前に必ず読むこと。

取扱説明書 2B701-950EN

- ・「安全に関する全般的な情報」
- ・「使用・管理に関する全般的な情報」

【保管方法及び有効期間等】

〈保管の条件〉

- ・周囲温度 : -10℃～50℃
- ・相対湿度 : 30%～95% (結露状態を除く)
- ・気圧 : 700 hPa～1060 hPa

〈耐用期間〉

4 年 [自己認証 (当社データ) による]。

(但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用され、指定の保守点検と定期交換部品・消耗品の交換をした場合の年数であり、使用状況によっては異なる場合がある)

〈消耗品〉

ソノカブラ

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検 (日常点検) 〉

1) 目視による点検

(1) 外観の確認

プローブの外観に異常がないことを確認すること。

- ・ケーブル、付属品等に損傷や磨耗がないこと。

(2) 清浄性の確認

清浄な状態であることを確認すること。

- ・プローブ、付属品の洗浄・消毒方法は、取扱説明書等の指示に従って行うこと。

2) 機能の確認

(1) プローブの正常状態の確認

プローブの正常状態・正常動作を確認すること。

- ・プローブを診断装置に接続し、正常に動作すること。
- ・異音、異臭がないことを確認すること。

詳細は取扱説明書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

電話番号 0120-503251（コールセンタ）

ホームページ <https://jp.medical.canon>

〔販売業者（販売店）〕

--