

**2019 年 7 月改訂（第 7 版）

*2016 年 9 月改訂（第 6 版）

医療機器届出番号 25B2X10004000002

医療用品（04）整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

キズガード

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【**形状・構造及び原理】

パッド : レーヨン、ポリエステル、低融点ポリエステル
粘着テープ : ウレタン不織布、シリコーン・アクリル系粘着剤
セパレーター : 紙、シリコーン樹脂

【*使用目的又は効果】

創傷面の保護

【*使用方法等】

創傷面を清潔にし、パッド部分を創傷面に当て、テープをしっかり押さえて密着させてください。

【使用上の注意】

*重要な基本的注意

- ・最初つきにくく感じるがありますが、すぐに皮膚に馴染んでピッタリフィットします。
- ・患部を清潔にしてパッド部分を汚さないように注意して使用してください。
- ・粘着面を患部に貼らないでください。
- ・よく伸びるテープですので、貼る時に皮膚を強く引っ張らないようご注意ください。
- ・パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、貼り替えてください。
- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等が生じた場合には、使用を中止し、*医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ・*1 日 2～3 回、貼りかえてください。一旦剥がしたものを再度使用しないでください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼り付けたり、急激に剥がしたりしないでください。
- ・個包装が破れたり、開けられたりしない限り滅菌効果を保ちます。
- ・品質保持期限の過ぎたものは使用しないでください。

【*保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- ・小児の手の届かないところに保管してください。

【*製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元・製造元 東洋化学株式会社
〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008
電話 (0748) 52-5780

発売元 大正製薬株式会社
〒170-8633 東京都豊島区高田 3 丁目 24 番 1 号
電話 (03) 3985-1800