

\*\*2016 年 9 月（第 4 版）（新記載要領に基づく改訂）

\*2014 年 1 月（第 3 版）

医療機器届出番号 25B2X10004000019

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

## ネオプラスター 2

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【\*\*形状・構造及び原理等】

パッド : セルローススポンジ  
粘着テープ : ポリオレフィン、アクリル系粘着剤  
セパレーター : 紙、シリコーン樹脂

### 【\*\*使用目的又は効果】

創傷面の保護

### 【\*\*使用方法等】

穿刺部分等を清潔にして、その上にパッド部分をあて両側のテープで固定してください。

### 【使用上の注意】

#### \*\*重要な基本的注意

- ・ 穿刺部分を清潔にし、パッド部分に手を触れないように注意して使用してください。
- ・ 粘着面を穿刺部分等に貼らないでください。
- ・ パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、貼り替えてください。
- ・ 本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等が生じた場合には、使用を中止し、\*医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ・ 一旦剥がしたものを再度使用しないでください。
- ・ 皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼り付けたり、急激に剥がしたりしないでください。
- ・ 個包装が破損しているものは、滅菌の効果が失われている可能性がありますので、使用しないでください。
- ・ 品質保持期限の過ぎたものは使用しないでください。

### 【\*\*保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- ・ 小児の手の届かないところに保管してください。

### 【\*\*製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元・製造元 東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

電話 0748-52-5780