

**2016年9月（第5版）（新記載要領に基づく改訂）

*2014年1月（第4版）

医療機器届出番号 25B2X10004000031

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布

JMDNコード 34655000

ふわっと滅菌パッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【**形状・構造及び原理等】

パッド：ポリエチレン、脱脂綿

【**使用目的又は効果】

創傷面の保護

【**使用方法等】

傷口を清潔にして本品を傷口にあてて、絆創膏などで固定する。

【使用上の注意】

**重要な基本的注意

- ・パッド部分が汚れたり水にぬれた時は、新しいものに貼りかえてください。
- ・パッド表面のネットは、はがさずにそのまま傷にあててください。
- ・表裏はありませんので、どちらの面をあてていただいても結構です。
- ・パッドに薬（軟膏など）をつけて傷にあてると、血液や膿などを吸わなくなる可能性がありますのでご注意ください。
- ・1日**2～3回、貼りかえてください。本品の使用は1回限りになしてください。
- ・本品の使用により、発疹、発赤、かゆみなどの症状あらわれた場合には、使用を中止し、*医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- ・品質保持期限の過ぎたものは使用しないでください。
- ・個包装が開封、破損及び汚染している場合は使用しないでください。

【**保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光を避け、なるべく湿気の少ない、小児の手の届かない所に保管してください。

【**製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元・製造元 東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻1008

TEL (0748) 52-5780