

*2009年 9月15日(第2版)

2005年 6月1日(第1版)

*医療機器届出番号 25B2X10004000032

医04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布

JMDNコード 34655000

ネスコパッドS

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理】

パッド：レーヨン、ナイロン

【使用目的、効能又は効果】

創傷面の保護

【操作方法又は使用方法等】

傷口を清潔にして、本品の肌色のツルツルした面を傷口にあて、同封の固定用粘着テープで固定する。

【使用上の注意】

- ・使用中に汚れたり水にぬれた場合は、傷の治りが悪くなりますので新しいものと取り替えてください。
- ・片面に肌色のナイロンをはってあります。必ずこの肌色の面を創傷面にあててください。
- ・お薬をぬる場合は、肌色のツルツルした面にぬって創傷面にあててください。
- ・本品の使用は1回限りにしてください。
- ・創傷面の改善がみられない場合、又は発疹、発赤、かゆみなどの症状あらわれた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
- ・本品は滅菌済ですので、開封後はすみやかに使用してください。また、品質保持期限の過ぎたものは使用しないでください。
- ・滅菌袋が破れたり、開けられたりしない限り滅菌効果を保ちます。

【貯蔵方法及び有効期間等】

- ・小児の手の届かない所に保管してください。
- ・直射日光を避け、なるべく湿気の少ない、涼しい所に保管してください。

【包装】

70mm×115mm 5枚入り袋包装
140mm×230mm 3枚入り袋包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元・製造元 東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻1008

(TEL)(0748)52-5780