

**2014 年 1 月 15 日改訂（第 3 版）

*2009 年 9 月 15 日改訂（第 2 版）

*医療機器届出番号 25B2X10004000039

医療用品（4）整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

ケーパイン防水パッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理】

パッド : ポリオレフィン、レーヨン、ポリプロピレン、ポリエチレン
粘着テープ : ウレタン樹脂フィルム、アクリル系粘着剤
セパレーター : 紙、シリコーン樹脂

【使用目的、効能又は効果】

創傷面の保護

【操作方法又は使用方法等】

創傷面を清潔にし、白色の紙を剥がしてパッド部分が傷口を保護するように貼り付けてください。四方の粘着部が浮いたり、シワにならないようにしっかりと固定した後、クリーム色の紙を中央からゆっくり左右に剥がしてください。

【使用上の注意】

- ・患部を清潔にしてパッド部分を汚さないように注意して使用してください。
- ・粘着面を患部に貼らないでください。
- ・パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、貼り替えてください。
- ・発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止し、**医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- ・一旦剥がしたものを再度使用しないでください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼り付けたり、急激に剥がしたりしないでください。
- ・本品は滅菌製品ですので、開封後は速やかに使用してください。また、品質保持期限の過ぎたものは、使用しないでください。
- ・個包装が破れたり、開けられたりしない限り滅菌効果を保ちます。

【貯蔵方法及び有効期間等】

- ・直射日光、水ぬれ及び火気を避け高温・多湿でない清潔な場所に保管してください。
- ・小児の手の届かないところに保管してください。

【包装】

60mm×80mm S サイズ 5 枚入り袋包装
80mm×100mm M サイズ 3 枚入り袋包装
100mm×140mm L サイズ 2 枚入り袋包装
*100mm×140mm 在宅 L サイズ 6 枚入り小箱包装

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元・製造元 東洋化学株式会社
〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008
電話 (0748) 52-5780

発売元 川本産業株式会社
〒540-0022 大阪市中央区糸屋町 2 丁目 4 番 1 号