

**2014 年 1 月 15 日（第 3 版）

*2009 年 9 月 15 日（第 2 版）

*医療機器届出番号 25B2X10004000051

医療用品（4）整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

フィットバン A

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理】

粘着テープ：ポリウレタン樹脂フィルム、シリコーン・アクリル系粘着剤
セパレーター：紙、シリコーン樹脂

【使用目的、効能又は効果】

創傷面の保護（サカムケ、あかぎれ等）

【操作方法又は使用方法等】

保護したい部分の汚れ、汗、水気などをふきとり清潔にした後、しっかり押さえてお貼りください。

【使用上の注意】

- ・本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合には使用を中止し**医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- ・非常に薄いフィルムを使用しておりますので、シワが入らないように注意してお貼りください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので長時間貼り付けたり急激にはがしたりしないでください。
- ・個包装が破れたり、開封されたりしない限り滅菌効果を保ちます。
- ・品質保持期限を過ぎたものは使用しないでください。
- ・一旦はがした物を再度使用しないでください。

【貯蔵方法及び有効期間等】

- ・小児の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。

【包装】

19mm×60mm 20 枚入り小箱包装
38mm×46mm 10 枚入り小箱包装

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

問い合わせ先（TEL）0748-52-5780