

**2018年3月（第5版）

*2016年9月（第4版）

医療機器届出番号 25B2X10004000053

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 救急絆創膏

JMDNコード 34864000

やわらか防水パッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【*形状・構造及び原理等】

パッド : **ポリエチレンネット、レーヨン、ポリエステル
又はポリオレフィンネット、レーヨン、ポリプロピレン/ポリエチレン
粘着テープ : ポリウレタンフィルム、脂肪酸エステル含有アクリル系粘着剤
セパレーター : 紙、シリコーン樹脂

【*使用目的又は効果】

創傷面の保護

【*使用方法等】

創傷面を清潔にし、白色の紙を剥がしてパッド部分が傷口を保護するように貼り付けてください。四方の粘着部が浮いたり、シワにならないようにしっかりと固定した後、フィルムを中央の水色のテープ部分からゆっくり左右に剥がしてください。

【使用上の注意】

*重要な基本的注意

- ・患部を清潔にしてパッド部分を汚さないように注意して使用してください。
- ・粘着面を患部に貼らないでください。
- ・パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、貼り替えてください。
- ・傷口の改善が見られない場合、又は発疹・発赤・かゆみ等が生じた場合には、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- ・1日*2~3回貼りかえてください。一旦剥がしたものを再度使用しないでください。
- ・皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼り付けたり、急激に剥がしたりしないでください。
- ・本品は滅菌製品ですので、開封後は速やかに使用してください。また、品質保持期限の過ぎたものは、使用しないでください。
- ・個包装が破れたり、開けられたりしない限り滅菌効果を保ちます。

【*保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光をさけ、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- ・小児の手の届かないところに保管してください。

【*製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

東洋化学株式会社

〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008

問い合わせ先 (TEL) 0748-52-5780